

甘露醇除结晶器/仪

产品名称	甘露醇除结晶器/仪
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	8888888.00/台
规格参数	公司:福意联恒温箱 库存:现货 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

甘露醇除结晶器/仪产品说明-

甘露醇注射液作为高渗透降压药,是临床抢救特别是脑部疾患抢救常用的一种药物,具有降低颅内压药物所要求的降压快、疗效准确的特点。遇寒冷天气或久置不用时易产生白色针状结晶,需加热溶解。临床上多用煮沸法加热,由于液体瓶身长时间放置于水中,标签易破损或脱落,造成字迹模糊不清难以辨认。

福意联甘露醇恒温箱突破原有加温方法,切实方便优良解决甘露醇结晶溶解问题,优良大限度的方便提高临床使用效率,在临床广泛使用。

甘露醇除结晶器/仪公司说明:

北京福意电器有限公司是冷藏,恒温,低温,冷藏运输等设备、制造与销售的企业。我们设计、研制的产品已广泛应用于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等、生物冰箱制药等领域,并以可靠的质量和稳定的性能,优良的售后保障等赢得了客户的肯定与认同。

甘露醇除结晶器/仪产品参数:

- 1、先确认甘露醇恒温箱工作状态正常,机器使用及外部供电正常稳定。
- 2、确认甘露醇结晶程度,如果甘露醇结晶比较严重,已形成絮状结晶或块状,需要42度以上温度经行溶解,等完全溶解后把温度调为37度恒温保存;如果甘露醇没有结晶现象,只需要37度恒温保存,防止结

晶及使用。

3、根据箱体大小放入相应的甘露醇瓶数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保甘露醇瓶完好不破裂现象。

4、使用者应根据甘露醇用量和甘露醇结晶情况来合理安排放入甘露的数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

甘露醇除结晶器/仪售后：

本着创造优良，提高企业知名度，树立企业形象，我们本着“一切追求高质量，用户满意为”的精神，以“优良优惠的价格、优良周到的售后、优良可靠的产量”的原则向您郑重承诺：

修期内或保修期外如设备出现故障，我司在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

甘露醇除结晶器/仪相关-甘露醇使用注意事项(1)除作肠道准备用，均应静脉内给药(2)甘露醇遇冷易结晶，故应用前应仔细检查，如有结晶，可置热水中或用力振荡待结晶完全溶解后再使用。当甘露醇浓度高于15%时，应使用有过滤器的输液器。(3)根据病情选择合适的浓度，避免不必要地使用高浓度和大剂量(4)使用低浓度和含化钠溶液的甘露醇能降低过度脱水和电解质紊乱的发生机会。(5)用于治疗水杨酸盐或巴比妥类药物中毒时，应合用碳酸氢钠以碱化尿液。(6)下列情况慎用：明显心肺功能损害者，因本药所致的突然血容量增多可引起充血性心力衰竭：高钾血症或低钠血症，低血容量，应用后可因利尿而加重病情，或使原来低血容量情况被暂时性扩容所掩盖，@严重肾功能衰竭而排泄减少使本药在体内积聚，引起血容量明显增加，加重负荷、诱发或加重衰竭；对甘露醇不能耐受者(7)给大剂量甘露醇不出现利尿反应，可使渗透浓度显著升高，故应警惕血高渗发生。B)随检查，血压，功能，血电解质浓度，尤其是Na⁺和K⁺ 尿量

勤发发