

暖手袋 暖手宝 冷热袋 冰袋

产品名称	暖手袋 暖手宝 冷热袋 冰袋
公司名称	上海龙柏塑料玩具有限公司
价格	2.00/个
规格参数	产品类别:热水袋 品牌:无 货号:LB-2A064
公司地址	上海市浦东新区合庆镇奚家村六队
联系电话	86 021 58979415 13585590572

产品详情

产品类别	热水袋	品牌	无
货号	LB-2A064	材质	PVC
产地	上海	适用送礼场合	广告促销
加印LOGO	可以	是否提供加工定制	是

产品名称: 熊猫暖手袋

货号: lb-2a064

材料: 环保pvc

规格尺寸:11x9cm0.45mm 6p phthalates-free pvc

用途和功效:

- 1: 驱风散寒, 舒筋活血, 消肿止痛及因受风寒引起的各部位疼痛;
- 2: 缓解风湿炎, 关节炎, 肩周炎, 胃痛等;
- 3: 冬季外出垂钓, 狩猎, 旅游时或户外及潮湿环境下作业者取暖

产品特点:

- 1: 环保——不用充电, 可循环使用;
- 2: 快捷——轻掰内置金属片, 产品迅速发热(50 以上);

3：时尚——大量不同的款式和造型，深得时尚人士的欢迎；

4：促销品——我们可以根据客户要求定做任何形状，尺寸，颜色和商标图案印刷。客户的商标或者图案可以印刷在产品上，因此也是一种非常好的促销礼品。

第一次使用:1. 一只手捏住袋体，另一只手之拇指与食指拿住袋内的发热片，上下按动几下，袋内液体将立即开始转变为固体并发热。（当敷袋为固态时按第二次使用之方法）

2：在液体转变为固体的同时，可用手掌轻轻按压袋体，使热量均匀扩散，让袋体温度均匀。3：趁热将敷袋放置于你所需要的地方或部位（如冬季被窝内，外衣口袋内或扭伤的肌体部位），进行取暖或热敷。

。

第二次使用 1：取暖或热敷60-120分钟后，袋体逐渐变凉，如欲再次使用，请用毛巾或棉布将敷袋包妥（避免袋体与加热容器直接接触）后，放入沸水中加热5-7分钟左右，使敷袋内固体全部变成液体，即可取出使用，此时因袋体处于高热状态，应用毛巾或棉布包裹，使袋体不要直接接触肌肤，以免烫伤。

2：待敷袋再次变凉时，依照第一次使用方法，再次按动发热片使敷袋内液体再转变为固体放热使用。

3：依照上述使用方法，本产品可连续反复使用，是理想的取暖（热敷）用品。