

体重秤婴儿体重称 身高体重测量仪婴儿秤 婴儿卧式体重称医用

产品名称	体重秤婴儿体重称 身高体重测量仪婴儿秤 婴儿卧式体重称医用
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	4900.00/台
规格参数	品牌:乐佳利康 型号:HW-B60 适用范围:妇幼保健院 儿科体检
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

产品详情

体重秤婴儿体重称 身高体重测量仪婴儿秤 婴儿卧式体重称医用

婴幼儿卧式身高体重测量精密体检仪

自动和手动模式，使得测量精准快速

美国进口超声波探头测量身长，中航高精密度压力传感器测量体重

滑动挡板辅助身高锁定，边缘刻度尺参考，精准快速

主显示屏LED高亮显示，待机显示温度、时间

身高测量范围：0-105cm 分度值0.1cm

坐高测量范围：0-105cm 分度值0.1cm

体重测量范围：0-60kg 分度值0.01kg

主体ABS工程模具成型，底部自带大空间储物柜，结实耐用

内置高速热敏打印机，自动打印测量报告

交流（照明电）：110V-240V,50HZ 直流（蓄电池）：12V ± 10%

功耗小于10W

整机重量40kg

尺寸129(长) × 47(宽) × 80(高)cm

儿童体检秤

一、型号：HW-B70和HW-B60

二、颜色：粉红色（市场销量比较好）和白色

三、婴儿身高体重测量仪区别：

1.HW-B70型全自动测量婴儿身高体重，测量数据语音播报、数码显示、选配打印功能。

2.HW-B60型半自动测量，体重自动测量，数码显示，身高滑动挡板看刻度尺读数，没有语音和打印。

四、婴幼儿卧式体检仪测量方法：

1.安放好机器，保证机身平稳，放在比较硬实的工作台面上，底部四个支脚调平，不能拧太紧。

2.然后轻轻把婴儿平躺放入量床

3.移动挡板至婴儿脚底后，B70型号需要轻踏测量开关，便自动测量出数据，同步语音播报，数码显示，打印测量报告。

4.B60型号体重自动显示，身高需要咱看刻度尺读出数值即可。

五、卧式婴儿身高体重仪注意事项：

1.机器四周不能有物体碰着，不能靠墙。

2.开机前机器上面不要放任何物品，防止自动置零。

3.机器底部四个支脚不能拧太紧，保证与机身有2cm距离。

4.测量过程中，尽可能让小孩伸直，不要动，保证测量准确度。