

婴幼儿医用电子秤 乐佳HW-B70婴儿身高体重测量仪批发

产品名称	婴幼儿医用电子秤 乐佳HW-B70婴儿身高体重测量仪批发
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	品牌:乐佳利康 型号:HW-B70 适用范围:妇幼保健院儿科体检
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

产品详情

婴幼儿医用电子秤 乐佳HW-B70婴儿身高体重测量仪批发

HW-B70电子婴幼儿卧式测量床身高体重婴儿秤

全自动智能精密卧式测量婴儿床，乐佳HW-B70型身长体重婴幼儿量床，带打印功能医院妇幼保健院专用婴儿秤

婴幼儿身高标准的生长规律：

足月儿身长平均为50厘米，出生后一年大约增长25厘米，所以一岁时大约是75厘米；以后每年大约平均增长5厘米，因此2—12岁以后小儿身长（厘米）=年龄×5+75（厘米）。凡身高超过标准10%或不足10%者就算不正常。

婴幼儿体重标准测量公式：

1-6个月时体重（公斤）=出生体重（或3公斤）+月龄×0.6（公斤）

7-12月体重（公斤）=出生体重（或3公斤）+月龄×0.5（公斤）

2-10岁体重（公斤）=年龄×2+7（或8）

HW-B70型电子婴幼儿卧式测量床身高体重婴儿秤主要测量0-3岁婴幼儿身高体重，卧式测量，只需要把婴儿放入测量床，脚踩一下测量开关，机器便可以自动测量出婴儿身高体重，同步语音播报，数码显示，打印测量报告等，人性化设计，使用更加方便，操作简单，工作人员一个便可以完成整个测量过程，超大量程，精工制作，进口配件，使得婴儿秤发往全国各个省市医院、体检中心、妇幼保健院、社区卫生服务中心、卫生院等。

型号

功能

HW-B70型

全自动一体化测量，同步语音播报数码显示，可选配外置微信热敏打印机，打印测量报告，整机人性化设计，整机轻巧大气，放在工作台上便可以进行体检。

HW-B60型

700E 主要功能：

- 一、自动测量身高、坐高、体重
- 二、测量结果语音播报、数码显示
- 三、科学计算出被测者的标准体重范围，即BMI值
- 四、实时电子时钟和室内温度显示
- 五、机身分开包装，方便运输

乐佳牌HW-700E儿童身高体重坐高秤

技术参数：

身高测量方式: 超声波测距(美国原装探头并实现温差补偿)

体重测量方式:精密平衡梁式压力传感器称重

体型:国际通用体格指数(BMI)

显示方式:主显示屏LED显示屏

测量范围: 身高测量范围：50-150cm 分度值0.1cm或0.5cm可切换

体重测量范围：8-120kg 分度值0.1kg

坐高测量范围：20-120cm 分度值0.1cm或0.5cm可切换

语音提示:有语音自动播报测量结果

电源电压:交流（照明电）：110V-240V,50HZ

直流（蓄电池）：12V ± 10%

半自动测量，体重自动测量，数码显示，身高需手动滑动挡板至婴儿脚底后，自行读出身高数据。

HW-1000型

全自动一体化测量，测量结果语音播报，数码显示，带热敏打印机自动打印测量报告，整机高档外观大气，放在地上便可以使用。

机器底部带大内存储物柜子

注意事项：

- 1.机器四周不能有物体碰着，不能靠墙。
- 2.开机前机器上面不要放任何物品，防止自动置零。
- 3.机器底部四个支脚不能拧太紧，保证与机身有2cm距离。
- 4.测量过程中，尽可能让小孩伸直，不要动，保证测量精准度。

测量方法：

- 1.安放好机器，保证机身平稳，放在比较硬实的工作台面上，底部四个支脚调平，不能拧太紧。
- 2.然后轻轻把婴儿平躺放入量床
- 3.移动挡板至婴儿脚底后，B70型号需要轻踏测量开关，便自动测量出数据，同步语音播报，数码显示，打印测量报告。
- 4.B60型号体重自动显示，身高需要咱看刻度尺读出数值即可。

婴幼儿医用电子秤 乐佳HW-B70婴儿身高体重测量仪批发,体检专用婴幼儿身高体重测量仪。