

() 便携式随身灸8cm加质不加价！特惠销售！

产品名称	() 便携式随身灸8cm加质不加价！特惠销售！
公司名称	冀州市恒益医疗保健用品厂
价格	4.00/件
规格参数	品牌:恒益 型号:ssj-2 产地:河北
公司地址	中国 河北 衡水市 冀州市魏屯镇魏屯
联系电话	86-03188965588 13722824888

产品详情

品牌	恒益	型号	ssj-2
产地	河北	箱装数量	100
贸易属性	内贸		

本品特点：携带方便，保温时间长久，

精致温灸器，适合成人和老人使用的。尤其是对妇女痛经、受风寒，湿气和受凉有很好的效果，同时温灸对减肥也有相当不错的效果。

温灸盒的使用说明：1、将艾条插入灸盒内固定支架点燃。2、将灸盒盖盖上并旋转锁定,然后调节出风口,以控制温度的高低。3、将灸盒置入保温袋中,用松紧带固定在患处。4、经常清除保温袋及灸盒内的灰烬,以保持清洁。

品名:便携式温灸盒 随身灸 本产品推荐使用108艾柱

规格约：直径：8cm

燃烧室上口径：6.5cm

高度：3.5cm

适用艾条规格：18*200mm分段艾条

另有彩壳可任您挑选，灸盒镀层，在使用当中没有油漆的味道，使用效果更佳。

随身灸常见问题解答

1、随身灸的是什么材料的？

随身灸盒由三个主体部件组成，其中里面两个是铁的，外面带有一个耐热pvc材料的调风盖。

2、随身灸外袋绑带有多长？绑在腰部够不够长？

绑带为松紧带，带有公母扣，正常状态下是50cm长，拉紧状态下约为1m长，如果还不够长，可以自己另外接绳子。

3、随身灸里用什么艾条比较合适？

一般的艾条只要切成2-3cm小段都可以用。小店推荐：

如果要方便的就选择五元素艾段：

如果要质量更好一些就选择热敏5年陈艾条：

如果要最好的就选择：

5、随身灸点着后会不会有油漆味和塑料味？

关于这个问题，店家自己一直在用，基本是不会闻到所谓的这些味道的，有的只是烟味。

6、随身灸用的时候会不会烫到？

随身灸有厚布袋隔着，正常的情况是不会烫到的。用的时候会感觉越来越热，这时可以旋转调风盖调节风门大小，或可加个艾绒垫隔热，实用而不影响疗效