

指环电极 肌电图神经传导电极 肌电图指环电极

产品名称	指环电极 肌电图神经传导电极 肌电图指环电极
公司名称	青岛泰诺康医疗技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰诺康 产地:青岛
公司地址	山东省青岛市黄岛区渭河路917号乙2层211室
联系电话	0532-86959323 18765923086

产品详情

产品名称：指环电极

SR型（弹簧指环型）：SR-2、SR-3、SR-5

WR型(钢丝指环型)：WR-2、WR-3、WR-5

【结构组成】：由导电材料和连接线组成。

【适用范围】：用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体。

【使用说明】：

(1) .BS、SR、WR、SS、SF型：一端与神经和肌肉刺激器连接，另一端接触受试者皮肤表面（红色为阳极，黑色为阴极），配合神经和肌肉刺激器使用。B型：使用者可根据检测需求选择包含其的上述型号产品，也可单独使用。

(2) .P型：一端与神经和肌肉刺激器连接，另一端贴在皮肤表面，配合神经和肌肉刺激器使用。

【产品性能】

BS、SR、WR、SS、SF、B型:导电阻抗应 2.0 , 误差应不超过标称值的 $\pm 10\%$ 。

P型:导电阻抗应 130 , 误差应不超过标称值的 $\pm 10\%$ 。

注:上述阻值对应1.5 m长导线,当导线长度增加时,对应阻值增加应不大于1/m。

【禁忌症、注意事项、警示】

- 1.装有心脏起搏器、人工耳蜗等植入性医用电子仪器者禁用;
- 2.癌症患者禁用;
- 3.癫痫病患者禁用;
- 4.孕妇禁用;
- 5.治疗部位有创伤、感染或有瘢痕的患者禁用;
- 6.心脏前、后部位禁用;
- 7.与本产品配套使用的神经和肌肉刺激器设备列明的其他禁忌症。

【产品运输】

产品在运输时应防止重压、雨水淋湿、高温受热。

【产品维护和保养方法】

用清水清洁晾干后保存。

【储存方法】

储存在温度 $-10 \sim +40$, 相对湿度 80% , 无腐蚀性气体、通风良好的环境内。