

皇圣堂烫熨治疗贴 骨伤科康复科疼痛科供应 烫熨热疗贴

产品名称	皇圣堂烫熨治疗贴 骨伤科康复科疼痛科供应 烫熨热疗贴
公司名称	山东皇圣堂药业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:皇圣堂、琼森 注册证号:鲁械注准20162260 产品优势:资质正规,医保报销
公司地址	山东省济南市市中区普利绿地中心
联系电话	053182023116 15665867330

产品详情

皇圣堂烫熨治疗贴生产厂家招商, 烫熨热疗贴oem/odm, 骨伤科膏药、康复科疼痛科膏药供应, 承接贴牌代加工。烫熨热疗贴上海医保挂网烫熨治疗贴 代理烫熨治疗贴 皇圣堂膏药厂 烫熨热疗贴 烫熨治疗贴价格

【产品名称】烫熨治疗贴

【规格】80mm*90mm、90mm*110mm、95mm*130mm、180mm*80mm、120mm*90mm、120mm*100mm、230mm*80mm

【结构性能】烫熨治疗贴由固定医用压敏胶贴、烫熨贴元素层、烫熨加温发热层、防粘离型纸制成。温度范围: 40 -70 、剥离强度不小于1.0N/cm、持粘性应不大于2.5mm、远红外发射波长范围8 μ m-15 μ m、法向比辐射率不小于80%。

【适用范围】烫熨治疗贴供医疗机构作为烫熨疗法的热源使用。

【注意事项】1、一次性使用, 用后销毁; 2、包装如有破损请勿使用; 3、严格按照说明书使用4、贴敷后无热感, 如有过敏等不适感应立即停止贴敷; 5、防止烫伤

【慎用】皮肤感觉障碍、过敏体质、糖尿病、小儿患者。

【禁忌症】24小时急性创伤的局部、皮肤破损、高热患者、急性期炎症患者、孕妇下腹部、血友病患者、活动性结核患者、恶性肿瘤患者

【警示】当热源使用有不适或症状加重时, 及时就医。

【使用说明】清洁患处, 确认包装无破损后, 打开包装, 取出烫熨治疗贴, 将隔离膜撕去, 按照传统烫

熨疗法贴于患处，每24小时更换一次。

【注册证号】鲁械注准20162260552

【生产许可】鲁食药监械生产许20140114号

【生产企业】山东皇圣堂药业有限公司

【生产日期】见包装

【有效期】两年