

# 儿童斜颈支具-骨科康复儿童斜颈支具-儿童斜颈支具厂家

产品名称	儿童斜颈支具-骨科康复儿童斜颈支具-儿童斜颈支具厂家
公司名称	安平县康博医疗器械有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:康隆达 型号:ETXJZJ 产地:河北省安平县
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	0318-8091006 15127820006

## 产品详情

### 儿童斜颈支具概述：

采用下颌托托住小儿的下颌部位，在下颌托上装有U型金属支架，支架高低可调，用于固定小儿头部两侧，下颌托靠固定在小儿身上的支承板通过联接件来支承，本矫形器使用方便，操作简单，可以随意调整被矫正的位置，对于不宜手术的习惯性斜颈，可较长时间地佩戴而。

### 儿童斜颈支具适应症：

小儿先天性斜颈手术后矫形和习惯性斜颈矫正，颈椎脱位半脱位复位后固定。

### 儿童斜颈支具产品特点：

头环固定装置有效限制头部旋转、确保颈椎固定；枕部控制装置大限度地适合各种枕骨形状；枕部微调装置可以对枕部高度沿斜向15度轨迹进行微调；胸压片高度控制结构可以根据患者体型调整背侧胸压片高度。枕骨托高度控制装置可以控制枕骨托高度直至承托枕骨。下颌调节装置可进行调整。前胸压片控制装置可根据不同的胸廓形状进行调整。下颌托高度控制装置可以控制下颌托高度直至承托下颌。

### 儿童斜颈支具使用方法：

先松开颌枕、肩、胸三对搭扣，将矫形器分成前后两片，先把后片戴好，矫形器上部顶着枕部，下部贴着肩背；再将前片戴好，矫形器上部托着下颌，下部贴着前胸。将后片双侧颌枕搭扣带穿过前片颌托两边扣环，向后拉至适度松紧粘住固定。再把后片双侧肩、胸部扣带分别穿过前片肩部和胸部的扣环，拉至适度松紧固定。然后旋转前侧螺旋撑拉器调节杆，将头颈调至适当对线位置

禁忌症：

1对塑料过敏者。2头颈部严重感染者。4严重精神疾病者。5背部 度以下压疮或感染者