

肩外展支具-肩关节康复支具-肩外展支具厂家

产品名称	肩外展支具-肩关节康复支具-肩外展支具厂家
公司名称	安平县康博医疗器械有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:康隆达 型号:加工定做 产地:河北省安平县
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	0318-8091006 15127820006

产品详情

肩外展支具介绍：

肩关节是人体中容易受到损伤的部位，肩关节损伤要经过固定、康复等过程，肩关节支具就是替代沉重的石膏固定，并且具有灵活可调节作用，轻便易用。

肩外展支具组成：

外展包，支撑块，长短带固定组合物。外展包外表面弯曲成凸状的凹曲以容纳人形腋；内部高密度，记忆泡沫填充，表面被覆尼龙布；内支撑块也相同的封装与外展和填充材料，通过与外展魔术贴分组连接的支撑块；两个条带的固定长分组和躯干固定外联，两个短带固定到前臂和支撑块上固定有两端外展包粘扣带，通过外联包，和支撑块长，带和固定的短之间的互连手术绑架支撑的配置，不仅肩外展，降低了局部修复肌腱紧张，促进肌腱愈合，使用方便，结构简单，坚固制动，穿着舒适。

肩外展支具适应症：

适用于肩部跌打损伤；肩关节骨折及喙肩韧带损伤；肩部脱位术后固定；急性肩周炎、化脓性关节炎、结核；肱骨骨折、三角肌麻痹、冈上肌腱断裂；肩关节部位骨折、臂丛神经麻痹或拉伤等症；

肩外展支具如何佩戴：

患者取站立位或半坐位，协助将肩关节保持在外展85-90°，内收45度，肘关节屈曲90度佩戴，佩戴好后将袋子拉直合适松紧；睡觉时须取半卧位，将肘关节垫实，以防悬空手部发麻。

注意事项：

穿纯棉宽松开襟衣服并拉平，以增加透气性和舒适度；

定期检查受压部位皮肤，以防压疮发生；

换衣服取下支具时，要用健侧手扶患者侧胳膊，轻拿轻放，保持位置不变，一定不要移位；

穿上衣服时应先穿患侧，再穿健侧，脱时则相反；

支具佩戴时间、关节开始活动时间以及活动范围，根据临床医生的要求进行。