

防褥疮圈垫-医用护理防褥疮圈垫-防褥疮圈垫批发

产品名称	防褥疮圈垫-医用护理防褥疮圈垫-防褥疮圈垫批发
公司名称	安平县康博医疗器械有限公司
价格	50.00/件
规格参数	品牌:康隆达 型号:FRCQD 产地:河北省安平县
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	0318-8091006 15127820006

产品详情

防褥疮圈垫介绍：

防褥疮圈垫又叫海绵体位垫，手术体位垫，医用体位垫。规格：40X17、35x15、30x11、25x9、20x8、15x5，根据不同身体不同部位（头部、背部、臀部、脚部）不同受伤面积而使用不同直径大小的褥疮圈。

防褥疮圈垫使用方法：

- 1.根据手术类型、手术需求、产品更新的情况，选择适宜的体位垫
- 2.定期对体位垫养清洁和消毒，使其保持在正常功能状态。
- 3.根据患者和手术准备合适的体位垫。
- 4.在转运、移动、升降或或安置患者体位时宜借助工具，确保患者和工作人员的安全。
- 5.在转运和安置体位过程中，应当做好保暖，维护患者的尊严并保护其隐私。
- 6.移动或安置体位时，手术团队成员应当相互沟通，确保体位安置正确，各类管路安全，防止坠床。
- 7.安置体位时，避免患者身体任何部位直接接触手术床金属部分，以免发生电灼伤；避免将患者的不同部位皮肤之间直接接触，以免发生电灼伤。
- 8.患者全麻后应对眼睛实施保护措施，避免术中角膜干燥及损伤。

9.安置体位后或变换体位后，应对患者身体姿势组织灌注情况皮肤完整性和安全带固定位置以及所有衬垫支撑物的放置情况进行重新评估，并观察原受压部位的情况。

10.术中应尽量避免手术设备、器械和手术人员对患者造成的外部压力。压疮高风险的患者，对非手术部位，在不影响手术的情况下，至少应当每隔2小时调整受压部位一次。