

stago血凝仪检测成套杯

产品名称	stago血凝仪检测成套杯
公司名称	青岛赛奥生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 山东 胶州市 青岛胶州阜安工业园一园
联系电话	86-0532-82295200

产品详情

药（械）准字	鲁食药监械（准）字2009 生产许可证 第2400001	000
产品注册证	000	灭菌方式 高压
有效期	24（月）	一次性使用 是

青岛赛奥生物科技有限公司成立于1998年，公司医械部专业生产血凝仪检测杯，专为法国stago血凝仪、北京赛科希德血凝仪、普利生血凝仪配套使用，经过多年来不断的改进，现已达到进口检测杯的质量标准，具有高透明、不卡杯、不重复，检测快速准确等优点。真诚欢迎来电垂询！15864234039蒋女士

“血凝仪检测成套杯”使用说明书一、结构原理“血凝仪检测成套杯”由纸盘、转盘、卷盘、检测杯单元（包括塑料检测杯、钢珠）和塑料带等组成。工作时在盛有血浆和试剂的检测杯中有一个钢珠，钢珠在磁场作用下来回摆动，通过摆动的幅度变化及停留下来的时间来检测相关项目，工作原理独特，检测快速，检测结果准确。“血凝仪检测成套杯”为非无菌产品。二、主要技术指标1、成套杯纸盘表面整洁、无破损；转盘、卷盘表面无毛刺，位置安装到位、无脱落现象，盘卷时，松紧适宜；塑料带两边侧孔均匀、无断裂。2、检测杯单元表面光洁、透明、无斑点、无刮痕；杯壁厚薄均匀，周边无毛刺；杯底轨道宽窄均匀，钢珠在其中能灵活滚动，钢珠表面光洁，无偏心。3、塑料带有足够的强度和韧性，在工作状态下不应被拉断和变形；检测杯应有一定的强度，在工作状态下不应出现破碎现象；检测杯与塑料带的连接强度应保证一般状态下不自动脱落，工作状态时方便脱落、无卡阻现象。4、成套杯应满足st血凝仪的使用要求。三、用途及适用范围主要用于临床凝血机制（pt、tt、aptt等）的一次性检验。四、使用方法使用时，将整盘检测杯安装在转轴上，卷盘轮安装在驱动轴上，将带有检测杯的带子一并置于仪器的进杯通道，测试时驱动轴转动拉动检测杯进入进杯通道，仪器自动抓杯用于测试。五、适用范围“血凝仪检测成套杯”适用于法国产st系列各类全自动血凝仪。六、禁忌症、注意事项、警示及提示性说明