

手术恒温箱

产品名称	手术恒温箱
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

福意联有着优良的基础。专注于医疗，实验室，化工，农业、质检、环保域，提供食品分析仪器、实验室设备、管道监测仪器等农业检测、食品、卫生防疫、环境保护等设备。我们为客户主要提供以下产品：[医用恒温箱](#)

(hengwenxiang)(柜)，医用加温箱(柜)，培养箱(柜)；[手术室保温柜](#)、[手术室保冷柜](#)、[福意联冰箱](#)(柜)、[药品小冰箱](#)(柜)、[医用车载冰箱](#)(柜)等，竭诚为客户提供检测解决方案。

手术室液体加热箱可用于冲洗液的加温。减少术后并发症。在经过手术应激后身体适应调节能力均大幅度下降，对冷刺激也更敏感，更易导致病人痉挛的发生。手术室液体加热箱可以降低寒颤发生率，可减少机体热量的丢失，减少其并发症，促进病人早日康复

使用说明--

盐水冲洗液37度加温，医用盐水注射液，甘露醇冲洗液，甘露醇注射液，手术室清洗液，消毒液的37度(或42度)加温清洗器官使用。(用途和使用方法：主要用于手术时伤口及器官的清洁冲洗，在使用时需要与人体相近的温度进行冲洗，以免因为温度过高或过低对伤口和器官造成外界因素刺激，严重者可至伤口感染，所以在使用前需用恒温加温箱加热至37度，方可安全使用。)

型号	温度范围()	产品用途	容积(L)
FYL-YS-50L	4-38	冷藏/加温/保温	50

FYL-YS-100L			100
FYL-YS-138L			138
FYL-YS-150L	2-48	冷藏/加温/保温	150
FYL-YS-230L			230
FYL-YS-280L			280
FYL-YS-310L			310
FYL-YS-430L			430
FYL-BW-11L	2-8	保温	11L
FYL-YS-45L	-25-10	低温	45L
FYL-YS-128	-30到10	88L	

一种医用注射盐水箱式自动恒温器，主要有保温箱体，带有玻璃视窗的箱门：在箱门外侧上方有控制按键、温度显示窗；箱内后壁上方有空气循环风扇，箱内中部后内壁有热风出口；箱内腔设有放置装有注射盐水袋、盐水瓶的多层托架；部托架一、二层间和二、三层间一侧壁上各有一个传感器；箱体内底层托架侧下角有陶瓷加热管；箱体背面一侧下部设有的控制器分别与AC220V电源、陶瓷加热管、控制按键、温度显示窗、传感器、空气循环风扇连接；接通电源开关，用控制按键输入温度设定值；启动陶瓷加热管、空气循环风扇，传感器实时检测的箱内温度传到温度显示窗，热风从热风出口排出；温度到设定上限，陶瓷加热管停止加热；反之陶瓷加热管加热。本实用新型使用方便，操作简便

- 1、应定期对恒温箱进行清洁（每年少2次）。清洁恒温箱时先切断电源，用软布蘸上清水或食具清洁剂，轻轻擦洗，然后蘸清水将洗洁精试去。
- 2、为防止损害箱外涂复层和箱内塑料零件，请勿用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、天那水、开水、油类、刷子等清洗恒温箱。
- 3、箱内附件肮脏积垢时，应拆下用清水或洗洁精清洗。电气零件表面应用干布擦拭。
- 4、清洁完毕，将电源插头牢牢插好，检查温度控制器是否设定在正确位置。
- 5、恒温箱长时间不使用时，应拔下电源插头，将箱内擦拭干净，待箱内充分干燥后将箱门关好。

我单位本着“高质量，优效劳，求开展”的肉体，以“优良产品、公道价格、贴心效劳”的理念和担负、地下的准绳。

1、产品配发考验合格证书和应用说明书，以确保用户能准确应用我公司产品。

2、我公司保证出厂的产品均按有关国家规范花费和考验，不合格的产品决不出厂。

保证严厉实施、兑现产品三包，严厉履行国家工业产品售后效劳有关规矩，对出厂产品自觉货日起的产品装置12个月以内（以先到者为限），若买方可以证实产品是契合本公司建议的方法准确装置与应用；可以证实产品自身确有设计、资料或加工缺点，并向本公司提出版面恳求，本公司将负现缺点产品收费召回维修，更换或按订货价全额退款。