

A超兽用B超测孕仪母猪用山羊测孕仪怀孕检测超声器械养殖设备

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | A超兽用B超测孕仪母猪用山羊测孕仪怀孕检测超声器械养殖设备 |
| 公司名称 | 郑州高新区乐福农牧电子仪器经营部 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 产地:运高 |
| 公司地址 | 郑州高新区沟赵办事处祥瑞苑10号楼2单元102号门面房（经营场所） |
| 联系电话 | 13939072615 |

产品详情

名称：兽用A超

品牌：美国运高

型号：Preg-Tone II Plus

产品类别：检测仪器设备

尺寸：5.7cm*15.7cm

重量：150g

属性：通过声音判断母猪是否怀孕

Preg-Tone II Plus

Designed Specifically for Swine Detect Pregnancy Quickly... Accurately... Efficiently! FAST Test is completed in seconds! Confirm pregnant or open in less than 30 seconds (at 30 days)! SAFE All testing done externally; no harm to sow or litter. ACCURATE Accuracy proven by many thousands of producers! DURABLE Tough plastic, acid resistant. Will last for years! INEXPENSIVE 9 Volt replaceable battery will last for months! SIMPLE One Hand Operation! Use any oil for skin contact. No lights to watch! QUALITY RENCO has over 30 years experience designing and manufacturing ultrasound equipment. Use any oil for skin contact. Squeeze instrument to turn on. Hold against animal to test. — A超测孕仪工作原理当您拿到怀孕探测仪并用手按“ON”这个键时，它会通过探测头（Transducer）发出一种叫超声波的高频率声波，怀孕探测仪的探测头必须和母猪有适当的超声波“皮肤接触”。当在母猪的皮肤和探测头的表面抹上一些油后将会有比较好的皮肤接触，如有比较好的皮肤接触并按下“ON”键，怀孕探测仪会发出一种简短的音调。母猪的子宫在怀孕期间充满了羊水，当超声波和

子宫里的羊水接触的时候会产生一次回应，这些超声波的回应被接收并且有怀孕探测仪所产生可持续听见的声音（哗哗的长短声）来表示，使我们知道母猪是否怀孕。二、A超测试结果只有间断的声音（无任何连续的长音）=“母猪没有怀孕”间断的哔音有伴随连续的声音=“母猪已怀孕”为了获得精确的测试结果，早可以在母猪配种后18天进行测试，晚不能超过母猪配种后75天，在配种后18天进行的测试应该在30天后再重复一次，以保证精确的测试结果。三、A超检查怀孕探测仪是否正常工作用你的大拇指挤压怀孕探测仪的正面中心部位，这是“ON”键（见图）你可听到声音，这表示这个仪器工作正常，如没有听到声音，请参看关于故障的说明。四、A超测试程序当您开始检查您的母猪以前，您必须准备好一种帮助接触的液体，象石蜡油、菜油或机油，或者专用超声吻合剂，抹在怀孕探测仪的探头表面或喷洒在母猪身上，这些油将帮助您的仪器和母猪有一个比较好的皮肤接触。在测试期间，好使母猪隔离和安静下来（在喂料时做测试），您将只需要15-30秒的时间，就可以得到测试结果，如果您对测试程序熟悉以后，您可能只需要5秒的时间就可以完成一头母猪的测试。