

# 保温箱、冷藏箱 疫苗冷链箱 医用冷藏箱

产品名称	保温箱、冷藏箱 疫苗冷链箱 医用冷藏箱
公司名称	厦门浩添冷链科技有限公司
价格	230.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区锦园西三路286号210室
联系电话	86 0592 5768098 13030883797

## 产品详情

型号：htll1080外尺寸：340×210×230

mm内尺寸：290×160×165mm总容量：8升有效容积：5.5升总重量：2.9 kg空箱重量：1.5

kg胶体冰条数：7条(蓄冷材料)箱体材质：高强度程塑料隔热材料：聚胺脂密封材料：橡胶保温时间：常温环境8 以下可保持15小时以上

产品简介：内外层均采用高强度程塑料注塑而成，中间夹层采用聚胺脂材料，箱内侧采用特制的高效蓄冷材料“胶体冰”补冷降温，可保持冷链低温8 以下15小时以上。适合户外携带、运送各类疫苗等使用。是户外低温冷藏疫苗最为理想的新型产品。

一、产品简介：内外层均采用pp硬制塑料注塑而成，中间夹层采用pu隔热保温发泡材料，箱内侧采用特制的高效蓄冷材料“胶体冰”补冷降温，可保持冷链低温（2-8 ）30小时以上。打开箱体可直接观察箱内温度，实时掌握冷链情况。本产品适合户外携带、运送各类需冷藏运输的产品使用。是户外低温冷藏运输最为理想的新型产品之一。

### 二、使用方法

- 1、先将冰排灌入普通自来水8成左右，放置冷库或冷柜内冷冻约10小时（该时间长短与设备冷冻能力有关），直到冰排完全成固体。
- 2、把冻结好的冰排放入疫苗冷藏箱。
- 3、等待包内温度达到要求后，放入物品；合上盖子。

### 三、注意事项：

- 1、每个疫苗冷藏箱标准配置冰排,前后各放置两个，左右各放置一个；底部放入2个；可以根据物品需要

冷藏时间长短，增加或减少冰排的放置数量。

- 2、当使用一段时间后，箱内的温度高于8 时，把冰排重新放入冻柜冷藏。
- 3、尽量将冰排完全冻结后再使用，冷藏时间才会更长。结冻后冰排可再次冻结，重复使用。
- 4、轻拿放冰排，避免破损，冰排一经破裂，请停使用，使用前请检查。
- 5、冰排内的水不用更换。

#### 四、公司概述：

公司是集研发、生产、销售于一体的专业从事冷藏科技研究和开发的民营科技型企业，主要致力于户外低温冷藏用品的研究和开发，是专业生产户外冷藏用品的公司，拥有自己独立的知识产权和自主出口权。公司主打产品疫苗冷链包、疫苗冷链箱。广泛适用于医用冷藏以及户外休闲娱乐等方面。

#### 五、合作的伙伴：

中美葛兰素史克；法国赛诺菲巴斯德；福建疾病控制中心；甘肃疾病控制中心；厦门疾病控制中心；江苏延申；北京科兴；上海生工；北京康瑞莱科技；漯河市召陵疾控中心；广东省高州疾控；福建省环境监测中心...

tel：0592-5768098-807

mob：13030883797

qq：1294108139