

医用颈托-骨科医用颈托-医用颈托厂家

产品名称	医用颈托-骨科医用颈托-医用颈托厂家
公司名称	安平县康信医疗器械有限公司
价格	50.00/件
规格参数	品牌:康信 型号:加工定做 产地:河北省安平县
公司地址	长安街8号
联系电话	0318-8091006 18617600107

产品详情

医用颈托-骨科医用颈托-医用颈托厂家

颈托属于医用外固定支具的一种，适用于颈椎骨折，脱位、颈椎牵引后、颈椎手术前后，颈椎间盘突出症，颈椎病骨折固定，脱位复位等。常用颈托有三种：软颈托，由高密度海绵和棉布及粘扣制作而成；充气式颈托，由软塑料制成，用时充气戴于颈部，充气量多少根据个人的舒适程度而定，个人颈部尺寸用途及病情而定，这种颈托比较实用，因为任何两个人的颈部尺寸轮廓都不同；硬颈托，由硬塑料，高分子泡沫和金属支持器或调节器制成，它的固定和限制作用较大，多用于颈部急性严重损伤，如颈椎骨折脱位的固定。

医用颈托使用需要注意的事项：

每天颈部皮肤的清洁垫和更换1-2次；

颈托的保养：用软刷蘸温水或冷开水加洗洁精将颈托清洗处理干净，用毛巾进行擦干，放阴凉处晾干，不可用吹风机吹干或烈日下晾干，免变形；

出院后继续佩戴颈托3个月，避免颈部剧烈运动，继续肢体功能训练，停止做一些颈椎过度活动；

颈托可以通过白天戴上，休息时除去。长期发展应用颈托会引起颈背部肌肉萎缩、关节僵硬，所以需要穿戴工作时间不可过久，在症状已经逐渐成为减轻后，要及时除去，加强学生肌肉功能锻炼；

停止使用颈托的，必须去复查，然后决定停止使用的时间。

温馨提示：

颈托久戴可能会产生依赖，或造成颈部肌肉萎缩。合理巧用颈托，能辅助康复。

本品请在医师指导下使用。如有需要请及时就医。

总结：选择合适颈托，每个人情况不一样，佩戴时间也不一样，一定要按照医生给与的综合意见配合恢复。