

一次性病毒采样管

产品名称	一次性病毒采样管
公司名称	山东博威医疗器械有限公司
价格	6.00/支
规格参数	博威:3
公司地址	山东省菏泽市成武县苟村集镇祝楼行政村窑厂西200米路东
联系电话	0530-6115966 13905303746

产品详情

病毒保存液说明书

【产品名称】

病毒保存液

【包装规格】

3ml/支

【预期用途】

用于人鼻咽部病毒样本的采集、保存和运送。

【检验原理】

本品是一种无毒的可以直接使用的样品保存液，能够将具备传染性的病原体灭活，避免标本运输人员与检验人员在操作过程中受到二次感染的风险。本品可以在室温10分钟内灭活99%以上的细胞或病毒，使细胞或病毒的DNA或RNA释放，同时，保存液中的有效成分可以使RNA在常温条件下保存7天而无明显降解，DNA可于常温条件下保存1月而无明显降解。

【主要成分】

产品名称	规格	主要成分
样本保存液	3ml/支	硫酸铵、Surfactin、柠檬酸钠、三（羟甲基）氨基甲烷、乙二胺四乙酸、中性红

【储存条件及有效期】

2-37 保存，有效期12个月。

【样品要求】

使用本产品采样后，在室温下保存7天，核酸检测不受影响。在低温条件下可长期保存。采样后的标本可常温运输，37 以上运输应不超过7天。

【使用方法】

- 1、 取样前清洁双手，用清水漱口1-2次，去除口腔中的食物残渣，咽尽口腔中剩余的清水。
- 2、 撕开采样棉签外包装。
- 3、 将棉签伸进口腔内，在内侧颊粘膜处反复擦拭8-10次以上，至棉头已经被唾液充分浸润（应无食物残渣等异物黏附）。
- 4、 打开样本采集管，将采样后的拭子放入保存液中润湿，在靠近顶端处折断拭子杆。
- 5、 旋紧管盖，完成样品取样。

【产品性能指标】

待检样品保存标本2-37 保存7天与新鲜采集的样品提取核酸检出率一致。

【注意事项】

- 1、 产品使用前请检查包装是否破损，如有破损严禁使用。
- 2、 采集的拭子样本可于2-37 保存7天，于-20 保存12个月，鉴于样本存在的个体差异，不同样本的具体保存期限有所差异。
- 3、 可使用商业化的相关试剂盒进行拭子样本核酸的纯化。