

国产手术室吊塔

产品名称	国产手术室吊塔
公司名称	山东华昇医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市开发区
联系电话	15588736678

产品详情

手术室的吊塔安装是有着相对严格的安装方式，其中包括一些科shi器械的分配，各个手术室的功能要求都不一样，所以在安装吊塔的时候必须严格按照手术室吊塔安装方案进行安装实施。吊塔的安装简单，但是按照方案去做的话会给院方带来很多困难，因为手术室吊塔安装方案对手术室的要求，以及手术室的场地面积都有严格的要求，所以实施起来有一定的难度，所以我们要认真学习本方案，严格的按照方案去安装，使用正确的方式方法安装。为手术的顺利进行完成好安装工作。

?横臂、终端箱及仪器平台旋转不灵活

常见原因：吊管上部关节轴承处拼紧螺母过紧2.中部横梁关节轴承处拼紧螺母过紧

解决方案：调整拼紧螺母即可。

?横臂、终端箱及仪器平台旋转角度超过340°，不能限位

常见原因：1.转动时由于用力过猛使定位销断裂2.定位销脱落

解决方案：更换定位销即可。

?飘移；吊塔有时会出现飘移现象，会给手术造成不必要的麻烦，影响手术的效率。

常见原因：一般是因为吊塔底座不平，或支架晃动造成的。

解决方案：对吊塔支架进行加固。

一般采用的安全色有以下几种：

红色：用来标志禁止、停止

黄色：用来标志注意危险。如"当心触电"、"注意安全"等。

绿色：用来标志安全无事。

蓝色：用来标志强制执行。

黑色：用来标志图像、文字符号和警告标志的几何图形。

操作人员的安全意识到位。在操作的时候一定要树立安全意识，因为吊塔的使用不仅关系到自身的安全，还关系到病人的安全，要本着对自己负责，对患者负责的意识来使用。要具有很好的专业能力。吊塔的操作还有管理人员都必须具备一定的专业能力，国产手术室吊塔，在使用之前能够对他们进行一定的培训，这样，才能够保证正确的操作还有管理，并且能够在这个过程中及时的发现问题，并解决问题。要能够定期对部件进行检查。只有经过定期的检查，才能够确认现阶段使用的状况，并及时发现问题，做出相应的修理还有报废与的处理。

国产手术室吊塔由山东华昇医疗器械有限公司提供。“I,II类器械及耗材销售”就选山东华昇医疗器械有限公司（www.hsylqxu.com），公司位于：山东省曲阜市开发区，多年来，华昇器械坚持为客户提供好的服务，联系人：付经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华昇器械期待成为您的长期合作伙伴！