

## 老年人用品 东智 磁疗保健拐杖手杖

产品名称	老年人用品 东智 磁疗保健拐杖手杖
公司名称	襄樊市东方电器有限责任公司
价格	90.00/个
规格参数	品牌:东智 部位:手掌 型号:DZ-801
公司地址	中国 湖北 襄樊市 襄樊市长虹南路6号
联系电话	86 0710 3017863 13507287785

### 产品详情

品牌	东智	部位	手掌
型号	DZ-801	产地	湖北襄樊
箱装数量	20	贸易属性	内贸

**一、产品简介** dz-801型磁疗保健手杖是运用中医穴位疗法和生物磁疗共震法将具有特殊磁疗功效的强磁晶石镶嵌于手杖的手把上，作为力激源，运用磁场共振，共振能量波既可通过脉冲振动传递至全身血管各处，迅速降压和血液粘稠度，清除血液内淤积软化，疏通血管，使小动脉血管扩张，减低动脉血管的冲力，从而使血压下降。使用一段时间后可改善体内微循环，疏通血管和自然降血压;

舒筋活血，提高免疫力，清除疲劳;

磁力线对手心和虎口两个穴位进行磁场疗法,新研制的高科技磁疗手杖，同时对手部位的两大穴位进行磁场共振。对高血压，心绞痛，耳聋脑鸣，心脑血管疾病都有一定疗效。

主要由手柄，铝合金伸缩杆、防滑橡胶垫、高度调节套、助行减震装

置、海绵护套、求助电话号码卡、led超亮电筒、fm自动收音装置、遇险呼救报警装置、报警闪光灯、强力磁疗装置、低频按摩装置、可充电电池组、充电器等组成。它具有造型美观，助行安全，收音休闲，遇险求援，磁疗按摩，使用方便的特点。产品适用于老年人，腿脚不方便的残疾人，病人及旅游登山人员等。二、主要技术参数

1、产品尺寸：700mm-1350mm（长短可调）2、工作电压：dv4.5v（三节aaa7号可充电电池）3、报警声级：70db4、照亮度明：13000-15000mcd  
5、使用温度：-40 -55 6、使用湿度：95%

### 三、功能及使用方法

1、磁疗保健 运用中医穴位疗法和生物磁疗共震法将具有特殊磁疗功效的强磁晶石镶嵌于手杖的手把上，作为力激源，运用磁场共振，共振能量波既可通过脉冲振动传递至全身血管各处，迅速降压和血液粘稠度，清除血液内淤积软化，疏通血管，使小动脉血管扩张，减低动脉血管的冲力，从而使血压下降。使用一段时间后可改善体内微循环，疏通血管和自然降血压。2、遇险求助报警把拨动开关拨向第四档呼救位置，当老人行走发病摔倒或夜间睡觉突发疾病时，如脑溢血，心肌梗塞，心脏病可顺手推倒手杖，产品倒地后自动发出声光呼救报警信号，向行人或家人呼救求助。行人发现病人后，可根据手杖上显示的求助电话号码，向其家人联系。家里人听到报警声后，可迅速实施急救。

4、led超亮照明由5支 5mm超亮发光二级管组合的高亮电筒，夜间走路时，把拨动开关拨向上方第一档位置，电筒发出强光照明，使用十分方便。2、fm调频收音把拨动开关拨向第三档收音位置，按下选台按钮、复位按钮，可自动搜索选台，适合于老年人，残疾人及旅游登山人员休闲时收听节目。

5、伸缩减震本装置由三节铝合金伸缩杆，减震弹簧，调节套，防滑垫等组成。根据使用者的身高，调节手杖伸缩杆，向左旋转下伸缩杆，拉出或推进调节准高度后，再向右旋转拧紧定位，减震防滑装置在使用时舒适平稳。

6、电池及充电手柄里内装有4.5v可充电池组，电池电压不足时，把充电器插头插入手柄尾部的充电插口，即可充电。充一次电，可使用15小时左右。

四、注意事项1、电筒光亮减弱或是收音机音量变小，说明电池电压不足，请及时充电。2、不使用本产品时，拨动开关要拨向第二档关机的位置。3、有病的老人，请把家人的电话号码填写于“求助电话号码卡”里，以免外出时不慎摔倒后，提示行人给你家人打电话联系。4、本产品勿放在高温高湿的地方。5、本产品质量实行三包，三个月内包换，一年内包修。拆开电路及人为损坏的自负。