

新供应优质捷儿金冷热袋

产品名称	新供应优质捷儿金冷热袋
公司名称	上海捷儿金保温制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GelKing 材质:pvc 容量:可要求 (ml)
公司地址	中国 上海市 上海浦东新区合庆镇前哨路398号北首
联系电话	86 021 58971798 13002150578

产品详情

品牌	Gel King	材质	pvc
容量	可要求 (ml)	颜色	可变
产地	上海	箱装数量	可要求
贸易属性	内贸、外贸		

现代医学越来越提倡冷热敷疗法，其冷敷能使人体表层受冷而致血管收缩，减少致痛物质释放，从而控制及减轻症状。热敷则是增加人体表层温度继而使血管扩张，加大血液流量，改善人体微循环，达到减轻症状及加快痊愈的目的。

适用范围:

热敷1.平放入微波炉中，然后加热，加热时间为1分钟20秒。2.加热后将其取出揉捏1分钟，使其热量均匀分布（温度略有升高）。3.如果温度适宜，即可使用，如觉温度过高，可冷却后再用。4.常温保存。

冷敷:1.确保冷热敷袋用棉布或毛巾包裹。2.首次使用时，把冷热敷袋平放在电冰箱中至少两小时。3.把冷热敷袋从冰箱中取出就可用于患处。4.可以放在冰箱中存放以便随时使用。

冷疗适应症：主要用于72小时内受到损伤的治疗，关节扭伤、肌肉及韧带拉伤、撞伤、挫伤、肿胀、皮下出血以及多种原因导致的头痛、发烧、牙痛、烧伤、烫伤、蚊虫叮咬等。

热疗适应证：主要用于慢性或反复发作伤痛的治疗，肌肉和关节疼痛、强直症、肿胀、肌肉抽筋、痉挛、腰肌劳损、关节炎、风湿以及各种寒症。

注意事项：1.本产品仅供外用，如内容物接触眼睛或皮肤，应用清水彻底清洗。如不慎误食内容物，应饮下大量清水及尽量吐出，必要时联系医生。

2.不要用尖锐物品刺磨袋体，或将敷袋随意重压，以免损坏。

3.本产品不得食用，严禁儿童咬食。