

# 多头腹带-临床多头腹带-多头腹带源头厂家

产品名称	多头腹带-临床多头腹带-多头腹带源头厂家
公司名称	安平县康信医疗器械有限公司
价格	30.00/件
规格参数	品牌:康信 型号:加工定做 产地:河北安平
公司地址	长安街8号
联系电话	0318-8091006 18617600107

## 产品详情

多头腹带注意事项：

手术后及时佩戴效果理想；出现头晕不适停止使用；过敏体质慎用。

使用多头腹带胸带的目的就是为了绷扎胸、腹部伤口；施加适当压力，支撑身体，使患者保持舒适，预防伤口裂开。

多头腹带的使用：

准备多头腹带携至患者床旁，向患者及家属解释操作的目的、意义、方法；

将腹带平放于患者腰背部，展开两侧带脚；

沿腹带重叠次序逐一将带脚紧贴腹部包裹，带脚互相交错压住，松紧度要适宜；

将剩余的一对带脚打结固定。

注意事项：

如果伤口在上腹部，应由上而下包扎，如伤口在下腹部，则由下而上包扎，因此放置腹带时要注意方向；

后打结时，打结部位应避免伤口处；

在患者变换体位时，胸、腹带容易松动，应及时观察并再次包扎；

胸、腹带包扎时松紧要适宜，以伸进1个手指为宜。

多头腹带简介：

采用纯棉白布经过精心裁剪，缝制而成，腹带两头各有5至6条带子，用时左右互相压着，所以固定牢固、使用方便，适用于术后固定；本白纯棉布，舒适、吸汗；卷边无线头；多条状，方便调节松紧程度；适用于术后，束紧胸腹，有利于伤口的康复；产后束紧腹部，有效的促进松弛腹壁的恢复。

包装：200件/箱，规格：大中小，特殊规格样式可加工定做，公司实力雄厚，有信誉。