

# 西门子助听器 AMIGA 172N 有线盒式机/老人助听器盒式机

产品名称	西门子助听器 AMIGA 172N 有线盒式机/老人助听器盒式机
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	225.00/个
规格参数	品牌:西门子 材质:ABS 产地:苏州
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层 A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

## 产品详情

品牌	西门子	材质	ABS
产地	苏州	加印LOGO	不可以
是否提供加工定制	否		

【商品型号】 西门子172型盒式助听器

【生产商】：西门子

【功能特点】

大功率<100db

随身听式袖珍型

新型的onh开关

【相近型号的主要性能指标】

	172型	176型
声增益	59db	59db
*大声输出	131db	131db
低频限制	130hz	130hz
高频限制	4800hz	4800hz
谐波失真	7%	7%

等效噪声	32db	32db
线圈灵敏度	-	109db
工作电压	1.5v	1.5v
工作电流	10.8ma	10.8ma

国际卫生组织将听力损失分级如下：

平均听力损失小于25分贝为正常；  
 平均听力损失介于26~40分贝为轻度听力损失；  
 平均听力损失介于41~55分贝为中度听力损失；  
 平均听力损失介于56~70分贝为中重度听力损失；  
 平均听力损失介于71~90分贝为重度听力损失；  
 平均听力损失大于91分贝为极重度听力损失。

功能特性 · 随身听式袖珍型 · 新型onh开关 · 优良的性价比

电池型号 5

西门子公司凭借着卓越的产品性能、\*\*的产品质量及平实的价格为中国听力患者提供了国际化的助听康复服务，赢得了国内众多听力患者的信赖。

怎样使用助听器 1、将耳机和导线与助听器主机相连将导线一端的“l”形插头插入助听器主机上的插孔。将导线另一端的扁平插头插入耳机侧面的插孔将硬塑料接头与耳机头口紧，然后选择适当的耳塞与之相连，（即：按外道的大小选择耳塞头）2、放入电池不可大力的将盒盖开启。于缺口处手指轻轻上掀，打开盒盖，将一枚aa型（5号）干电池置入电池仓内。干电池上的“+”号必须对应电池仓内的“+”号必须对应电池仓内的“+”号。将带子压在干电池下方，以方便以后取出干电池，小心吧盒盖关上。3、操作o-n-h开关n位置：正常位置 麦克风接通h位置：降低频噪音o位置：助听器关闭4、音量控制附有使用简单的音量旋钮。音量大小可随意调节，从位置1（\*低音量）到位置4（\*高音量）保养和维护请您经常地用干燥软布擦净您的助听器。小心拿好您的助听器，千万不要使他摔落地上或与硬物相撞。请不要把助听器直放在太阳底下曝晒。如果您不使用助听器，要把他的开关拨到“off”（关）档上。若助听器常时间不用，应将电池取出，以防止电池漏液，而使助听器腐蚀