

西门子SIMENS声霸VITA 118盒式助听器/老人助听器

产品名称	西门子SIMENS声霸VITA 118盒式助听器/老人助听器
公司名称	深圳市权金龙电子有限公司
价格	170.00/个
规格参数	品牌:西门子 材质:ABS 产地:苏州
公司地址	深圳市福田区燕南路与振南路交界处中泰燕南名庭（二期）D1512（仅限办公）
联系电话	0755-83281983 13631696468

产品详情

品牌	西门子	材质	ABS
产地	苏州	加印LOGO	不可以
是否提供加工定制	否		

【基本信息】

品牌：德国西门子材质：塑料配置：平均听力损失不大于100分贝的弱听人士产地：苏州尺寸：出厂日期：规格：保质期：一年颜色：

【推荐语】

世界知名品牌，品质保证

商品说明

【技术数据】声增益 71db最大输出 127db谐波失真 <8%等效噪声 <28db电池 5号电池，1.5v工作电流 <12ma【机器特点】小巧精致的中大功率盒式助听器，使用方便可靠携带方便金属扣，经济型5号电池带有onh开关，经济实用又方便适用于中度到重度弱听人士配置输出限制微调（pc）经济超值

【品牌说明】

西门子是世界上最大的跨国集团公司之一，所属的西门子听力集团是听力技术方面的专家，经过近一个世纪的创新与发明创造，她的技术处于世界领先的地位，也正因如此，西门子助听器的销量始终保持着世界的第一位。

产品名称：西门子simens声霸vita 118盒式助听器/大功率老人助听器性能介绍：袖珍型大功率盒式，onh开

关设计，精巧外型结构特点，小巧精致；寻呼机式外观设计，随声听式肉色导线和耳机；带有onh开关，经济实用又方便；特大柔和方便型音量电位调节器附件。技术参数：声增益：71db最大输出：127db谐波失真：<8%等效输入噪声:<28db工作电压:1.5v工作电流:<12ma附件：说明书、保修卡、电池、收藏盒【机器类型】所属系列：模拟式所属类别：盒式助听器适用人群：平均听力损失不大于100分贝的弱听人士(参看下面的部分确定听力损失程度)【机器特点】小巧精致的中大功率盒式助听器，使用方便可靠携带方便金属扣，经济型5号电池带有onh开关，经济实用又方便适用于中度到重度弱听人士配置输出限制微调 (pc) 经济超值

维护和保养：一、请您在下列情况下取下您的助听器：1.洗头 洗澡 喷发胶或摩丝时；2.进入强磁场或高频地区，如医院的一些理疗室;3.避免直接接触x光射线;二、使用干布，可用助听器专用清洁剂喷在干布上后清洁您助听器的外壳三、不要摔碰您的助听器，免受强烈震荡;四、请在夜间睡前将您助听器的电池门打开，放入干燥盒内并定期更换干燥剂，避免您的助听器受潮。这对延长助听器的寿命、保障助听器平时的正确使用至关重要;五、避免您的助听器受高温伤害，请不要让您的助听器在阳光下长时间直接照射;六、为避免您的耳朵里的耳垢堵塞，请定期清洁您的耳模或耳塞，以保证助听器的正常使用;七、如果不使用助听器时，请随时调到“0”档，关闭助听器以延长寿命;八、请随时检查更换电池。警告：在有较大爆炸声的地方，千万别使用您的助听器。储存条件及方法：1.助听器应该放在干燥阴凉的地方，避免阳光直接照射。2.放在不易被小孩拿到的地方。3.建议：储存在放有干燥剂的专用干燥盒内或者电子护理室中。禁忌症及注意事项：从理论上讲，任何一位听力损失人士均可能成为助听器的使用者，目前未能用一个综合的量化指标衡量听力损失人士是否需要助听器，但在以下几种情况下应先考虑就医，然后由医生或验配师根据需要决定是否可以选择助听器。1.突发性耳聋性人士，尤其在三个月内发生。2.快速进行性听力下降。3.出现耳鸣，单侧或双侧。4.不明原因的单侧或双侧明显不对称的听力损失。5.听力下降伴有眩晕、头痛或耳痛。6.任何原因的传导性耳聋（外耳、中耳炎症，溢液，盯眈或异物栓塞等）。7.中枢性和非器质性耳聋。8.其它原因不易选择助听装置。注意事项：少数首次佩戴助听器的用户诉说有堵耳、自己说话声音太响等感受，一般三个月内将逐步适应。