

康福瑞托玛琳自发热护腰护膝护颈护肩

产品名称	康福瑞托玛琳自发热护腰护膝护颈护肩
公司名称	北京早康健康科技有限公司
价格	30.00/个
规格参数	品牌:康福瑞 颜色:黑色米黄色 材质:托玛琳自发热面料、弹力织物。
公司地址	中国 北京市大兴区 福兴路甲17号
联系电话	86 010 15130882088

产品详情

品牌	康福瑞	颜色	黑色 米黄色
材质	托玛琳自发热面料、弹力 织物。	尺寸	1000 (mm)
型号	大中小		

康福瑞热灸系列护具，用最新研究的高科技纳米技术提取多种矿物纳米精粉，结合中国传统中医药热灸理论，产生热电和压电效应，释放大量对人体有益健康的负离子、远红外线、磁能、等多种复合热能，透过人体皮肤，在人体的深处产生生物效应，从而达到治病、防病、保健的目的。

康福瑞远红外磁热灸护具，是一种新型的健康护具产品。对传统的护具产品进行了改进，添加了对人体有益的远红外热灸材料和永久磁石。热灸材料的主要成分为取自天然矿石的电气石（托玛琳）、锗等天然材料。当人体皮肤接触热灸材料表面时，在体温的激发下，热感应材料即时反应放出热量。在热能的增幅下，远红外负离子渗透到皮肤深处，能有效改善血液循环，疏通经络、祛风除湿、镇痛去寒、缓解身体局部疲劳与疼痛。燃烧体内多余脂肪达到一定减肥目的，适应日常家庭保健。系列护具产品有护腰、护膝、护颈、护肩、护腕、护踝、护肘等等。适用范围：祛风散寒，温经通络，活血止痛，适用于关节、肌肉僵硬、酸胀、疼痛等不适症状以及御寒保暖及瘦身减肥等日常保健。使用方法：1、日常使用将产品隔在内衣外面调整粘扣大小至松紧适宜，白天可以全天佩戴，晚上休息时解下来（因休息时可能会因为护具束紧压迫，导致呼吸不畅或阻碍血液循环）。2、强效热灸将产品直接贴皮肤佩戴，20分钟左右产生热感及针刺感，能量直达人体深层部位。强效热灸建议每次佩戴1小时，每日使用2次。如果使用者希望达到更快的效果，使用前可以用温湿毛巾擦拭黑点功能部位，或用温热毛巾擦拭所有要佩戴的皮肤部位。因使用者存在个体差异情况，偶有使用者在使用过程中有强烈灼热感，可以暂时摘下或隔内衣使用，该产品不会损伤皮肤。也有少部分人使用时热灸感不明显，可能是因为皮肤干燥体温低或微循环不好等原因，可以用热毛巾将使用部位擦湿或者喝些热水。护具新用时，发热较强，随着使用时间的加长，发热强度变弱，开始发热时间将变长，即使护品不发热了，仍然具有理疗效果，一般可以使用1-2年。产品特点：1、当场佩戴，当场见效。2、负离子、远红外，磁疗、自发热四效合一，远期效果好。3、佩戴舒适美观，随时使用，不影响工作，学习，生活。4、纯物理作用，无药物成分，对人体安全无任何副

作用。5、即热型显效产品，无需外部电、热源。禁忌症：1、出血性疾病及有出血倾向者；2、急性传染病和高烧患者；3、急性重症、心、脑、肾功能不全者；4、甲状腺功能亢进患者；5、术后或急性外伤48小时内；6、装有心脏起搏器者；7、温度感觉障碍及佩戴部位皮肤破损者；8、孕妇及儿童不宜使用。注：如局部出现发红、灼热属于正常现象，产品取下后现象会自然消失。本产品用于日常护理，不能代替药品或医疗器械使用。祛风散寒，温经通络，活血止痛，适用于肌肉僵硬、酸胀、疼痛等不适症状。

应存放在阴凉、清洁、干燥处。运输中应注意防晒、防雨、防雪，不得与有害有毒或腐蚀性物品混合运输。严禁浸入水中泡洗，可用清水轻轻擦拭，勿用清洁剂、漂白剂洗涤。孕妇及儿童不宜使用1、出血性疾病及有出血倾向者；2、急性传染病和高烧患者；3、急性重症、心、脑、肾功能不全者；4、甲状腺功能亢进患者；5、术后或急性外伤48小时内；6、装有心脏起搏器者；7、温度感觉障碍及佩戴部位皮肤破损者；8、孕妇及儿童不宜使用。