

北京早康拔罐器 早康磁疗拔罐器

产品名称	北京早康拔罐器 早康磁疗拔罐器
公司名称	北京早康健康科技有限公司
价格	24.00/套
规格参数	品牌:早康 产品类别:拔罐器 部位:全身
公司地址	中国 北京市大兴区 福兴路甲17号
联系电话	86 010 15130882088

产品详情

品牌	早康	产品类别	拔罐器
部位	全身	型号	6罐12罐24罐

早康真空拔罐器系列产品，是将现代科技与传统医学融为一体的新型保健佳品，是替代老式拔火罐的新型家用保健器械。操作简单、使用方便、价格低廉，深受患者欢迎。传统中医拔罐疗法，历史悠久，广为流传。他是我国人民长期同疾病斗争中，逐步发展起来的一种有效治疗技术。俗话说：“针灸拔罐，病好大半”，但古老的拔罐疗法也易烫伤、不安全、部位受限、适用范围小的局限。真空拔罐器，改传统点火排气为真空抽气，使拔罐吸附于体表穴位，形成局部充血或轻微淤血，促使该处经络畅通，活血化淤气血旺盛，平衡阴阳，拔出体内风、寒、湿、热、毒等病症。广泛用于内、外、妇、儿、皮肤、五官等科治疗。【拔罐器的特点】：1、美观耐用：产品材质坚固，造型美观易用，耐碰撞。2、灵活通透：罐体呈淡兰色透明状，罐内负压可随意调整，易于观察施治区域。3、安全密封：罐口呈圆弧形，平滑，圆润，与皮肤接触面大，气密性好，不易脱落。4、规格齐全：罐体分为6种型号，大小适宜，适合人体各部位使用。直径6cm5cm4.5cm3.5cm2.5cm1.8cm各两个5、操作方便：不用火,不用电,安全可靠，携带方便，一学就会。【适用范围】：肩周炎、颈椎病、风湿性关节炎、高血压、脑血栓、感冒、神经性头痛、腰腿病、三叉神经痛、坐骨神经痛、腹泻、哮喘、便秘及急、慢性前列腺炎等病患。兼治：咽喉肿痛、耳鸣、耳聋、慢性鼻炎、风火牙痛、妇女月经不调、痛经、盆腔炎年、小儿遗尿、小儿厌食、蚊虫叮咬等病【使用方法】：1、根据病情选好穴位，选穴说明如下：阿是穴是最明显痛点（在治疗参考取穴图中未标示）。治疗参考取穴图中所标示的穴位，位于人体躯干前后正中线，即任、督二脉上的穴位为单一穴位。其它穴位为对称排列。图表中只标示了一侧，在治疗中均应取双侧穴位。取穴时，可根据治疗参考取穴中所列穴位分成两组，每天一组轮换使用。2、选取适当罐具及舒适的体位（可分为坐位、仰卧、侧卧及俯卧位）3、将选好的罐具顶部活塞上提一下，以保证通气。4、将负压枪口轻轻套住罐具顶部活塞后，垂直快速提拉杆数次，至拔罐内皮肤隆起，病人可耐受为度。5、在不能直接拔罐的部位（如脊椎、腰部）可使用连接器（另购）。连接器安装方法：先将连接器一端的连接杆大头连接备用前嘴的大孔，再将另一端连接杆小头连接负压枪口，使之成为一体，然后前嘴与拔罐有活塞的一头套在一起，再将拔罐放在需要治疗的部位。6、罐具吸附于体表之后，将负压枪口左右轻轻旋动向后退下，轻按一下罐具活塞一防漏气。7、治疗结束时提一下活塞即可。8、拔罐具使用后常规用消毒液、酒精棉擦拭。不可浸泡，水煮或高温处理等。9、罐疗时拔不上，请检查拔罐内胶塞是否严封，负压枪和拔罐连接是否过紧，负压

枪和拔罐是否垂直，负压枪和拔罐提拉时对皮肤压力是否过大。【注意事项】：1、拔罐时要选择适当体位和肌肉丰满，皮肤平滑，没有毛发的部位，根据所需拔罐部位，选取不同规格的罐具，如确实需要在不平部位及毛发部位拔罐，可用和好的面圈垫在拔罐口下面，以防漏气或选取异型拔罐。（另购）皮肤干燥，可先将皮肤湿润后再拔罐。2、患者在初次治疗时，应先选用小拔罐，并小用拔罐，轻刺激。3、罐子拔上后不要移动体位，在使用多拔罐疗法时，拔罐与拔罐之间应保留一定距离，不宜排列过近。4、高热，昏迷，抽搐等急性，危重病人应先明确诊断病情以免延误抢救治疗时机5、起罐后，局部潮红瘙痒不可以乱抓，经几小时或数日后，可消散。6、起罐后局部皮肤出现水泡，水珠，出血点，淤血等现象均属正常治疗反应。水泡轻者只须防止擦破，待其自然吸收即可；水泡较大时，常提示病情较重。可在水泡根部用消毒针刺破放水，敷以消毒纱布以防感染。7、患者精神紧张，饥饿，体位不当，或拔罐吸力过大时，患者有时会突然出现面色苍白，恶心欲吐，多汗心慌，四肢发冷，脉沉细，甚则神志昏迷，唇甲青紫，二便失禁，脉细微欲绝等现象，此为晕罐，应立即起罐，使患者平卧，注意保暖，轻者休息片刻，饮温开水或糖水后可恢复；重者在上述处理后如仍不缓解，可考虑配合其他治疗或采用急救措施。8、拔上拔罐以后，须询问病人感觉怎么样，如有发热，发紧，凉气外出，温暖舒适的感觉都属于正常反应。如病人感觉过紧灼痛。难受可能是吸拔力过大或此处不适宜拔罐，或改用小拔罐。9、拔罐，起罐时应保持室内温暖，避开风口，防止受凉。【拔罐印色素反应如下】：1、罐印紫黑而暗：一般表示供血不足，行经不畅有血淤现象。2、罐印发紫并伴有斑块：一般表示寒凝血淤症。3、罐印呈散在紫点状，且深浅不一，表示气滞血淤症。4、罐印鲜红而艳：一般表示阴虚，气血两虚或阴虚火旺。5、罐印红而暗：表示血脂高，且有热邪。6、罐印灰白，触而不温，多为虚寒或湿邪。7、罐印表面有皮纹或微痒：表示风邪或湿症。8、罐体内壁有水气：表示该部位有湿气。9、罐印出现水泡，说明体内湿气重，如果水泡内有血水，是湿热毒的反应