

海威格兔宝/迷你小音箱/卡通音箱/兔子音箱 卡通迷你音箱

产品名称	海威格兔宝/迷你小音箱/卡通音箱/兔子音箱 卡通迷你音箱
公司名称	贵阳海威格科技有限公司
价格	169.00/个
规格参数	品牌:海威格 型号:H009 类型:电脑小音箱
公司地址	中国 贵州 贵阳市 金阳南路
联系电话	86-08515280460 18608504888

产品详情

品牌	海威格	型号	H009
类型	电脑小音箱		

21世纪什么最贵？人才。商业社会什么最贵？项目。

创业想成功，人才与项目这两个因素缺一不可！有人才，无项目，那是巧妇难为无米之炊！有项目，无人才，那是纸上谈兵！

财富，是创业成功的一个标尺！金钱没有暴增，财富没有累积，这样的创业，就是失败！要实现金钱暴增，财富累积，海威格，就是达成这一目标的绝世好平台！

相信您就是——人才，创业的理想和欲望，充盈于您心胸，海威格，就是绝对让您理想激情喷薄而出，绽放绚丽色彩的天空！

健康时尚海威格——这是所有海威格人的使命！来吧！来吧！未来是属于您！属于我！属于我们海威格人的！让我们一起掘取到21世纪朝阳产业金矿的同时，实现我们人生伟大的理想和社会价值！

产品名称：海威格腰颈康产品型号：h200903

【采用最尖端的变频技术】

电源：ac220v ± 22v/50hz ± 1hz

功率： 40va

输出电压：0—100v连续可调

工作电压：dc5v 500ma

环境温度范围：-10 —40

工作环境相对湿度： 70%rh

最大脉冲电量： < 7uc

能量强度输出级数：32级可调

热能温度： < 60

定时时间：0-30分钟

中频脉冲频率范围：1—100khz

低频脉冲频率范围：0.1—1000hz

脉冲宽度：0.07-1.2ms

产品尺寸（含包装）：405mm × 290mm × 130mm

毛重：2.0kg

功能：主要用于腰肌劳损、腰椎间盘突出、腰椎骨质增生、颈椎病、颈椎骨质增生、肩周炎等慢性病的保健康复、按摩理疗、舒经活络、消炎镇痛。同时对常见的骨质增生、膝关节骨质增生、风湿关节炎、网球肘、腱鞘炎、失眠、头痛、胃痛、高血压、静脉曲张、前列腺炎、中风后遗症、乳腺炎、糖尿病等慢性病有保健康复、辅助理疗的效果。

适用范围：适用于健康人士、各种亚健康人士的养生保健。

基本原理：

- 一、中低频生物电疗
- 二、数码技术与经络通
- 三、针灸及按摩
- 四、远红外温热
- 五、场效磁疗
- 六、激光理疗

七、药物导入

八、足底反射疗法

产品特性：彩屏显示、真人语音、数码技术、八大疗法、六路输出、十六颗按钮、一人多部位同时使用、多人同时使用、激光理疗、32级能量输出强度调节标配明细：海威格腰颈康主机一台、远红外热能袋一套、松紧带一条、能量导线一条、自粘性能量贴一副、液导能量杯一套、使用说明书一本。

注意：使用本仪器前，首先将强度调节旋至于零（最小），以免对皮肤造成突然过大的刺激！

警告：下列情形者避免使用或要在主管医生的指导下方可使用：心脏病患者；甲状腺机能亢进者；使用心脏起搏器、人工心肺仪、心律调整器等患者；妊娠期；发高烧者；出血倾向者；恶性肿瘤患者；伤口及皮肤溃疡部位；月经期、产后及儿童或无法表达意识的人。注意事项：1、注意不要让能量贴一前一后放置于心脏两侧。2、使用过程中感觉不适时，请暂停使用。3、两能量贴最好成对靠近或要求邻近配穴使用。4、使用仪器后，能增加血液循环，明显提高痛觉感，乃属正常。5、两能量贴应避免直接相碰接触，以避免损坏仪器。6、远红外热能袋应绑紧，能量贴应贴近皮肤。7、把高频手术设备和本仪器同时连接到一个用户身上时，在本仪器能量贴位置可能引起烧伤，也可能损坏本产品；在短波或微波理疗设备附近使用（1m）按摩仪器，它的输出可能不稳定。

【加盟合作门槛】在获得盟员资格前，需要提交¥2000元市场保证金。【友情慎重提示】海威格欢迎所有志同道合的投资者！谢绝一切投机者咨询、加盟！联系方式：1、手机：186085048882、emial：sales@heavog.com3、qq：41692044、msn：kavor@sina.com