

一次性使用病毒采样管大量批发

产品名称	一次性使用病毒采样管大量批发
公司名称	山东博威医疗器械有限公司
价格	5.50/支
规格参数	博威:3
公司地址	山东省菏泽市成武县苟村集镇祝楼行政村窑厂西200米路东
联系电话	0530-6115966 13905303746

产品详情

一次性使用病毒采样管

20人份/盒用于样本的收集、运输和储存等。

采集后的标本应在2-8℃下48小时内送至实验室，如未能48小时送至实验室，应置于-70℃或以下保存。标本送至实验室后应尽快接种分离，48小时内接种分离后可置于2-8℃保存。如未及时接种分离应置于-70℃或以下保存。

产品应贮存在清洁卫生、干燥、通风的环境内；

温度为5℃~35℃ 3. 相对湿度 < 85% RH 4. 产品保质期：12个月。

采样前，在采样管的标签上标注相关信息。

用相应的采样棉签进行采样。

采样完毕，迅速将棉签放入采样管中，将高出采样管的部分折断，旋紧管盖。

具体采样方法详见如下：

a) 鼻拭子：用采样头轻轻插入鼻道内鼻腔处，停留片刻后缓慢转动退出，将采集好的标本浸入采样液中，多出部分折断丢弃，旋紧采样管盖。

b) 咽拭子：用采样头擦拭双侧咽扁桃体及咽后壁，将采集好的标本浸入采样液中，多出部分折断丢弃，

旋紧采样管盖。

c) 支原体、衣原体、脲原体标本采样：男性：用采样头插入尿道约2cm处旋转，停留片刻后退出，将采集好的标本浸入采样液中。女性：抹去宫颈口粘液，用采样头插入宫颈管1-2cm取样，将采集好的标本浸入采样液中，多出部分折断丢弃，旋紧采样管盖。（图）

致病菌标本采集后, 应使一次性采样棉签完全插入保存液中,

采集标本必须保证新鲜，及时送检，以免致病菌死亡。

禁止使用包装破损及过有效期的产品，以防污染。

注：本一次性使用病毒采样管用于体外诊断之用，不可用于人体或动物内服外用。若吞

食可导致严重事件；对眼睛和皮肤有一定的刺激性，若不慎溅入眼睛即用清水冲洗。