

神农 止鼾器 神农 其他

产品名称	神农 止鼾器 神农 其他
公司名称	任海鹰（个体经营）
价格	157.00/件
规格参数	品牌:神农 填充物:其他 产地:成都
公司地址	中国 江苏 徐州市鼓楼区 中山北路227号
联系电话	86 0516 00000000 15996928330

产品详情

品牌	神农	填充物	其他
产地	成都	贸易属性	内贸

用途：用于防止、减轻或消除打鼾。

适用范围：睡眠时打鼾者。

产品组成性能特点：本产品的结构主要是采用具有适当弹性的（法国进口高纯度医用硅胶）和具有（抗菌性能

极强的高科技材料纳米银）制成适合放入鼻孔中的医疗器械，它具有对鼻中隔可轻轻夹住的u字形的特殊结构，促使睡眠中的鼻腔黏膜和咽部软组织松弛的失常状态得到调节，从而发挥预防、减轻或消除打鼾的作用。

本产品优点：

本产品与国内外同类产品相比有如下优点：1、本产品中含纳米银，纳米银是一种对人体有益的微量元素，同时又是一种抗菌和抗病毒作用极强的物质，因此对产品本身有自洁和对鼻孔有清洁作用。

2、产品功能面与鼻中隔接触面较大，相对对鼻中隔的神经刺激面就大些，受影响而发挥调节作用的神经要多些，产生的调节作用就会大些。

使用方法:

上床睡眠时将止鼾器的两端半球形切面(即功能面)涂上少许芳香宜人的止鼾助剂后放入鼻孔内

,使两个半球形功能面夹住鼻中隔,u字形底部内面接触鼻中隔外部,另一方面靠贴上唇人中穴以上部位(如

,使两个半球形功能面夹住鼻中隔,u字形底部内面接触鼻中隔外部,另一方面靠贴上唇人中穴以上部位(如

,使两个半球形功能面夹住鼻中隔,u字形底部内面接触鼻中隔外部,另一方面靠贴上唇人中穴以上部位(如

图示),起床后将止鼾器放入清水中洗净凉干准备下次再用。

有效期：止鼾器只要没有变形即可长期使用；止鼾助剂有效期4年。

禁忌症：鼻孔有内伤时勿用。

防止打鼾应注意：

- 1、应避免饮酒，喝浓茶和咖啡，不过度疲劳；
- 2、养成侧卧位睡眠的习惯，避免仰睡，因仰睡时口腔后部会随重力下沉，阻碍上呼吸道；
- 3、改变睡眠时用口腔呼吸的习惯；
- 4、睡前不要让鼻腔有阻塞现象；
- 5、不吃肥腻的食物；
- 6、枕头不宜过高，尽量使头部和呼吸道保持平直状态。

认识纳米银古时候，我国蒙古族牧民们就发现，马奶放在普通碗里，几天之后就会发臭变坏，然而盛放在银碗里的马奶却能较长时间不变质。这说明，银能杀菌。银对液体中微生物具有吸附作用，微生物被银吸附后，起呼吸作用的酶就失去功效，微生物就会迅速死亡。银离子（即纳米银）的杀菌能力特别强，每升水中只要含亿万分之二毫克的银离子，即可杀灭水中大部分细菌。美国一科学家曾做过试验，他将4.5升污水(每毫升含大肠杆菌7000多个)经过3小时的银电极处理后,所有大肠杆菌全部死亡。伤寒菌只能

活18个小时,白喉菌只能活3天。

神农止鼾说明