

医用保温柜手术室，医院用保温柜

产品名称	医用保温柜手术室，医院用保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	8888888.00/台
规格参数	安装方式:嵌入式 公司:福意联保温柜 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

医用保温柜手术室，医院用保温柜公司说明--

北京福意电器有限公司重视科学管理，引入现代企业管理理念，迈着稳健的步伐在现代化企业的经营轨道上前进。精益求精的产量与尽善尽美的售后为我们赢得了每一位客户的赞誉。我们坚持贯彻质量保证体系，严格把关产量，确保代理商和用户无后顾之忧。公司生产医疗恒温箱、干燥柜、、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等系列产品。

医用保温柜手术室，医院用保温柜用途：

用手术室净化工程，可嵌入墙体。本产品适用于手术室，ICU，供应室等。目前福意联医院手术室保温柜报价已经为数千间手术室提供了优良的产品售后。

医用保温柜手术室，医院用保温柜使用说明：保温柜设置温度37-80度用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液、甘露醇、被服等。保冷柜温度设置4度用于生物冰箱试剂，，制品等储存。-----医用保温柜手术室，医院用保温柜参数：

- 1.产品型号:FYL-YS-151L2.产品形式:立式3.噪 音:42dB(a)4.功率:120W5.电压/额定频率:220V/50Hz6.温度范围:0-100 每一度恒温调节7.玻璃门:三层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高8.外形尺寸:(宽×深×高)：595×570×880mm9.内部尺寸:(宽×深×高)：508×426×636mm10.保温性能：采用高密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳

米材料门封条。11.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆;3层不锈钢搁架,可任意调节高度12.温度显示:微电脑程序控制温度,LCD数码显示,自动显示箱体内部温度13.安全锁:双安全锁设计,防止随意开启14.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警15.双系统:制冷系统与制热系统匹配合理,降温或加热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求、温度度高。16.风道设计:采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环,温度恒温稳定。17.箱

体:箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理。

1、型号:FYL-YS-150L2、有效容积:150L3、额定电压:220V4、温控范围:2-48 (每度可调可控,热补偿功能)5、箱体尺寸:595*570*865mm6、内径尺寸:520*440*660mm7、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。8、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。9、自动化霜功能,适合高温高湿地区,外门防凝露的应用,85%湿度无凝露10、电脑温度控制器,数码显示、控温精度高,具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能,防止出现意外。11、温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。12、制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。13、使用三层高强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度高,便于随时观察箱体内部存放的物品。14、采用新型全封闭压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。15、此产品为嵌入式恒温箱,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁,不占多余空间。16、箱体采用优良钢板,经防腐化喷涂工艺,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品。17、配置安全锁,可实现专人专管。

医用保温柜手术室,医院用保温柜产品特点:

智能温控系统1、微电脑程序控制温度,LCD数码显示、控温精度高,数字温度显示精度0.1。2、可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在0~100,调节增量为1。结构材料箱门内侧内胆采用凹凸型结构设计,增加了箱门的保温性能,门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗,便于随时观察箱体内物品。门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条,有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。人性化设计1、自动化霜功能,适合高温高湿地区,外门防凝露的应用,85%湿度无凝露。2、此产品可做嵌入式恒温加热设备,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁,不占多余空间。3、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

医用保温柜手术室,医院用保温柜相关:手术室净化有着严格的保证和要求(1)进入手术室必须更换洗手衣裤、鞋帽。(2)严格控制入室人数。(3)尽量减少层流手术室的开门次数与时间(更不可将门打开不关),维持"相对密闭状态",以防外来污染的进入。(4)手术前用擦拭室内物品、医疗程仪器、设备等。(5)术后及时、彻底清洁室内所有物品、墙壁及地面。(6)妇女不可用粉、头发喷雾剂和指甲油之类的化妆品,以减少污染来源。(7)工作服应选用不易产生静电、不易脱落纤维的涤纶和尼龙织物。(8)定期检测层流系统功能状态,测试层流手术室环境空气洁净度指标和细菌培养等。

勤发发