

医用高分子夹板

产品名称	医用高分子夹板
公司名称	中益（山东）宠物食品有限公司
价格	16.00/袋
规格参数	规格:20袋/盒 6盒/箱 型号:312-645 产地:山东菏泽
公司地址	菏泽市单县东城办事处天福路南端路西88米
联系电话	17615565236

产品详情

[高分子夹板](#)产品介绍与用途

医用高分子夹板由浸渍湿固化聚氨酯的多层玻璃纤维编织基布组成，并包裹在无纺织物制成的保护层内。

主要用于整形外科、骨科固定、矫形、肢体矫正、支撑和保护骨骼及软组织，并且适用于急救固定、骨折和扭伤、韧带拉伤等患者的临时固定。多种规格的医用高分子夹板能够满足肢体各部分的固定需要。

高分子夹板产品优势

1、使用方便快捷 预制的医用高分子夹板的多种规格基本满足四肢固定的需要，打开包装后直接可以使用，让固定手术变得方便快捷。

2、舒适、安全、卫生 柔软的无纺布外衬贴合皮肤，患者舒适度增加；两层无纺布经过特殊的抗菌处理，有效的抑制细菌，防止患者创伤部位的感染。

3、强度高、透气、防水 高分子夹板强度是石膏夹板的20倍，较高的强度能够有效的支撑需要固定的部位，防止病人肢体受到再次伤害，利于其康复。亚洁医用高分子夹板具有一般编织物的透气性，病人佩戴舒适，并且亚洁医用高分子夹板采用先进的透气无纺布，增强了医用高分子夹板的透气性。医用高分子夹板遇水不会开裂、变形，病人可以佩戴着洗澡和适当活动。

4、理化性能优越

X射线透过率高，方便复诊；无毒，无刺激性，气味芳香。

5、固化时间适宜

5~8分钟的固化时间，让医生能够有足够的操作时间塑形。

高分子夹板的使用方法

1、根据不同部位选择不同规格的产品。

2、打开包装，取出夹板，将医用高分子夹板网眼面单侧浸水，并尽量避免另一侧白色无纺布面（患者皮肤接触面）浸水，以免患者感觉潮湿不舒服。

3、把夹板覆盖在需要固定的部位，用纱布绷带或弹力绷带缠绕即可。

高分子夹板使用实例示范

高分子夹板产品规格

产品类型	型号	规格（宽×长）
医用玻璃纤维高分子夹板	312	7.50cm × 30cm
医用玻璃纤维高分子夹板	335	7.5cm × 90cm
医用玻璃纤维高分子夹板	415	10cm × 40cm
医用玻璃纤维高分子夹板	430	10cm × 75cm
医用玻璃纤维高分子夹板	530	12.5cm × 75cm
医用玻璃纤维高分子夹板	545	12.5cm × 115cm
医用玻璃纤维高分子夹板	630	15cm × 75cm
医用玻璃纤维高分子夹板	645	15cm × 115cm

腕关节固定可选用型号为312和41

5的[高分子夹板](#)

；拇指固定选用型号为312和415的高分子夹板；第四指、第五指固定选用型号为312和415的高分子夹板；肘关节固定选用型号为312和415的高分子夹板；前臂标准固定选用型号为335和430的高分子夹板；马蹄状固定可选用335和430型号高分子夹板；裸关节固定可选用430和530高分子夹板；大腿固定可选用型号为335和545的高分子夹板。

医用高分子夹板使用注意事项：

* 如需两袋以上，用完一袋再打开第2袋.

*在常温干燥的环境下存放，不要损坏外包装，以免变硬失效。

*硬化时间快慢与温度、湿水多少成正比关系。