

# 医用防护口罩 N95口罩 山东海迪科

产品名称	医用防护口罩 N95口罩 山东海迪科
公司名称	中益（山东）宠物食品有限公司
价格	6.00/个
规格参数	规格:20个/盒 型号:折叠型 灭菌方式:环氧乙烷
公司地址	菏泽市单县东城办事处天福路南端路西88米
联系电话	17615565236

## 产品详情

【产品名称】医用防护口罩

【型号规格】折叠形，头戴式；11.5cm × 15cm

【滤料级别】1级

【执行标准号】GB 19083-2010 医用防护口罩技术要求

【结构组成】医用防护口罩由面层、滤层、里层、鼻夹、口罩带等组成，面层、里层材料为聚丙烯纺粘无纺布，滤层材料为聚丙烯熔喷无纺布，口罩带材料为涤纶线编织而成、鼻夹为可弯折可定型的金属制成。经环氧乙烷灭菌，产品无菌供应。

【适用范围】适用于医疗单位过滤空气中的微粒，阻隔飞沫、血液、体液、分泌物。

### 【使用方法】

- 1、使用前检查包装是否完好，并对包装标志、生产日期进行确认，并在有效期内使用。
- 2、使用时，打开包装，佩戴口罩前以及摘下口罩前后都必须洗手；打开产品包装，一手托住防护口罩固定在面部，有鼻夹的一面为正面，有鼻夹的一边向上；佩戴口罩时，避免手部触摸口罩内侧，以防降低保护作用；

- 3、将下方口罩带拉过头顶，置于颈后耳朵下方；将上方口罩带拉过头顶置于头顶上方。
- 4、将双手指尖放在鼻夹上，从中间位置开始，用手指向内按鼻夹，并分别向两侧移动和按压，根据鼻梁的形状塑造鼻夹。
- 5、检查边缘贴合紧密度，以获得很好防护效果。摘下口罩时，应尽量避免触摸口罩外面部分。

#### 【产品性能】

- 1、口罩应覆盖佩戴者的口鼻，应有良好的面部密合性，表面不得有破洞、污渍，不应有呼气阀。
- 2、口罩上应配有鼻夹，鼻夹应具有可调节性。
- 3、口罩带应调节方便，应有足够强度固定口罩位置，每根口罩带与口罩体连接点的断裂强力应不小于10 N。
- 4、口罩对非油性颗粒过滤效率应 95%。

#### 【注意事项、警示】

- 1、本产品为一次性使用医疗用品。
- 2、包装破损禁止使用。
- 3、产品开封后应尽快使用。
- 4、本品建议使用时间长为8小时，用后请销毁。
- 5、每次佩戴医用防护口罩进入工作区域之前，应进行密合性检查。
- 6、口罩潮湿后、受到患者血液、体液污染后，应及时更换。
- 7、产品使用后按照医疗垃圾处理。

【灭菌】本品已用环氧乙烷灭菌，不能重复灭菌。

出口英文包装：

海迪科医用防护口罩生产线：

