

## 一次性医用口罩、医用口罩、海迪科口罩

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 一次性医用口罩、医用口罩、海迪科口罩                   |
| 公司名称 | 中益（山东）宠物食品有限公司                       |
| 价格   | 4.00/包                               |
| 规格参数 | 规格:10个/包<br>型号:17.5*9.5cm<br>产地:山东菏泽 |
| 公司地址 | 菏泽市单县东城办事处天福路南端路西88米                 |
| 联系电话 | 17615565236                          |

### 产品详情

**【产品名称】** 一次性使用医用口罩

**【型号规格】** 平面形，耳挂式；17.5cm × 9.5cm

**【执行标准号】** YY/T 0969-2013 一次性使用医用口罩

**【结构组成】**

由口罩体、鼻夹、口罩带组成。口罩体为三层结构，底层和面层由纺粘无纺布制成，中间层由聚丙烯熔喷无纺布制成，鼻夹由PE包镀锌铁丝制成，口罩带由锦纶+氨纶制成。产品以非无菌形式提供。

**【包装规格】** 10只/袋，200袋/箱

## **【适用范围】**

临床各类人员在非有创操作过程中佩带，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、颗粒物等的直接透过提供一定的物理屏障。

## **【使用方法】**

- 1.使用前检查包装是否完好，并对包装标志、生产日期进行确认，并在有效期内使用。
- 2.使用时，打开包装，将口罩有鼻夹的一面朝上，蓝面向外，白色面向里，轻拉耳带将口罩挂于双耳；佩戴口罩时，避免手部触摸口罩内侧，以防降低保护作用；佩戴口罩前以及摘下口罩前后都必须洗手。
- 3.轻按鼻夹使其与鼻梁贴合，将鼻夹弯曲调整，然后按住鼻夹，将口罩下端拉至下颌处；

4.整理口罩佩戴位置，使其覆盖整个脸部，检查边缘贴合紧密度，以获得最佳防护效果。摘下口罩时，应尽量避免触摸口罩外面部分。

### 【产品主要性能】

- 1.每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N。
- 2.口罩的细菌过滤效率应不小于95%。
- 3.口罩两侧面进行气体交换的通气阻力应不大于49 Pa/cm<sup>2</sup>。

### 【禁忌症】材料过敏者禁止使用

### 【注意事项、警示】

- 1、本产品为一次性使用医疗用品；
- 2、过期请勿使用；
- 3、包装破损禁止使用；
- 4、每次佩戴之前检查密封性；

- 5、口罩潮湿后及时更换；
- 6、产品使用后按照医疗垃圾处理；
- 7、产品开封后应尽快使用；
- 8、适用于非保护性隔离要求医疗环境，非特殊净化要求医疗环境，且不适用于无菌操作。

**【储存、运输条件】** 室温储存，相对湿度不超过80%，无腐蚀性气体和通风良好的室内。运输工具应清洁卫生、隔离火源。

出口英文包装：

**【包装规格】** 10只/袋；5袋/盒；40盒/箱

**【口罩生产展示】**

国内中文包装：

出口英文包装：