

儿童医用口罩、儿童口罩、医用口罩儿童款-海迪科

产品名称	儿童医用口罩、儿童口罩、医用口罩儿童款-海迪科
公司名称	中益（山东）宠物食品有限公司
价格	5.00/包
规格参数	规格:10个/包 型号:14.5cm × 9.5cm 产地:山东菏泽
公司地址	菏泽市单县东城办事处天福路南端路西88米
联系电话	17615565236

产品详情

山东海迪科医用制品有限公司生产的一次性使用医用口罩为三层结构，底层和面层由纺粘无纺布制成，中间层由聚丙烯熔喷无纺布制成，鼻夹由PE包镀锌铁丝制成，口罩带由锦纶+氨纶制成。本产品规格为12.5cm × 9cm，适合儿童和学生使用。

【产品名称】 一次性使用医用口罩（儿童口罩）

【型号规格】 平面形，耳挂式；14.5cm × 9.5cm

【执行标准号】 YY/T 0969-2013 一次性使用医用口罩

【产品描述】

山东海迪科医用制品有限公司生产的一次性使用医用口罩由口罩体、

鼻夹、口罩带组成。口罩体为三层结构，底层和面层由纺粘无纺布制成，中间层由聚丙烯熔喷无纺布制成，鼻夹由PE包镀锌铁丝制成，口罩带由锦纶+氨纶制成。产品以非无菌形式提供。

【适用范围】

临床各类人员在非有创操作过程中佩带，覆盖住使用者的口、鼻及下颌，为防止病原体微生物、颗粒物等的直接透过提供一定的物理屏障。本产品规格为14.5cm × 9.5cm，适合儿童和学生使用。

【使用方法】

1.使用前检查包装是否完好，并对包装标志、生产日期进行确认，并在有效期内使用。

2.使用时，打开包装，将口罩有鼻夹的一面朝上，蓝面向外，白色面向里，轻拉耳带将口罩挂于双耳；佩戴口罩时，避免手部触摸口罩内侧，以防降低保护作用；佩戴口罩前以及摘下口罩前后都必须洗手。

3.轻按鼻夹使其与鼻梁贴合，将鼻夹弯曲调整，然后按住鼻夹，将口罩下端拉至下颌处；

4.整理口罩佩戴位置，使其覆盖整个脸部，检查边缘贴合紧密度，以获得最佳防护效果。摘下口罩时，应尽量避免触摸口罩外面部分。

【包装规格】 10只/袋，200袋/箱

【禁忌症】 材料过敏者禁止使用

【注意事项、警示】

1、山东海迪科一次性使用医用口罩（儿童口罩）为一次性使用医疗用品

2、医用口罩保质期为两年，过期请勿使用

3、包装破损禁止使用

4、每次佩戴之前检查密封性

5、口罩潮湿后及时更换

6、产品使用后按照医疗垃圾处理。

【储存、运输条件】

一次性使用医用口罩（儿童口罩）贮存在阴凉干燥，清洁、避光、无腐蚀性气体、通风良好的室内。运输工具应清洁卫生、隔离火源。

【儿童口罩与成人口罩对比】

【海迪科生产车间】