

## Statim2000S密封圈安装说明

产品名称	Statim2000S密封圈安装说明
公司名称	上海润宝医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Statim 型号:Statim2000S 规格:1.8L
公司地址	上海市宝山区长江南路530弄181号
联系电话	18964057008

## 产品详情

### [Statim 2000S](#)密封圈安装说明

[Statim 2000S](#) 加拿大SCICAN（赛康）卡式压力蒸汽灭菌器：

#### [技术参数：](#)

机体尺寸:

长 48.5厘米

宽 41.5厘米

高 15厘米

[灭菌盒尺寸：](#)（包含手柄）

长 41厘米

宽 19.5厘米

高 4厘米

#### [灭菌盒内腔尺寸:](#)

长 28厘米

宽 18厘米

高 4厘米

#### [Statim 2000S密封圈安装说明](#)

- 1.在取出灭菌盒内密封圈之前,灭菌盒必须打开并冷却
- 2.从任意一个角开始,使用拆卸工具撬松密封圈,同时向下拉出
- 3.一旦一个角落空闲,请抓住密封圈向下拉出,以便将其从灭菌盒中取出。小心不要撕毁密封圈各个角落中的2个定位片(密封圈角上2个突出点)
- 4.清除盒内密封圈后检查并清洁灭菌盒槽中的残留物或碎屑
- 5.使用RPI润滑剂或液体肥皂,完全润滑密封圈就可以准备好安装注意:不必润滑灭菌盒的内部
- 6.安装密封圈时,最好从灭菌盒的后角(进气口处)开始。先安装好四个角,然后将密封圈滑入。将进气孔和它们的定位标签与盒子对齐。定位片必须穿过盒子的孔
- 7.将密封圈一次插入磁带盒的凹槽中
- 8.当您沿着安装密封圈方向移动时,请检查各个角落以确保定位片保持原位
- 9.在完全安装好密封圈后,对所有拐角和所有定位片进行最终检查
- 10.运行几个测试周期来检查蒸汽是否泄漏。注意:在测试周期中首先听到嘶嘶声是正常的。声音来自多余的液体润滑剂或肥皂液排出后密封正常
- 11.运行测试循环后,如果蒸汽仍然泄漏,请重新安装密封圈并运行其他测试循环。如果仍然发生蒸汽泄漏,可能问题不是密封圈,而是其他问题

2000E卡式灭菌器

2000S卡式灭菌器

5000S卡式灭菌器

加长型卡式灭菌器

statim5000G4 标准

statim5000G4 加长

卡式灭菌器整机：

Statim2000E

Statim2000S

Statim5000S

Statim5000S加长型