

电动多功能病床 急诊科卒中溶栓称重床 溶栓床

产品名称	电动多功能病床 急诊科卒中溶栓称重床 溶栓床
公司名称	济宁市鑫烁医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DC-003 产地:山东
公司地址	山东省济宁市兖州区龙桥街道华金中心1010室（注册地址）
联系电话	15624088513

产品详情

急诊科卒中溶栓称重床（电动多功能病床）

触摸屏电动病床（溶栓称重）

配置：ABS床头、ABS四小护栏、中控刹车、称重系统

一：规格尺寸：2260 × 10800 × 480/680mm(不包括床头高度)

二：升降功能：

- 1、背部升降：升降角度 0 ~ 80，±5；
- 2、腿部升降：升降角度 0 ~ 35，±5；
- 3、整体升降：整体升降高度为 200mm。
- 4、整体前倾：12 ± 2
- 5、整体后倾：12 ± 2

三、床面板

- 1、床面：采用优质冷轧钢板由模具成型，整体冲孔床面，四角均无焊接缝，钢板厚度 1.0mm，表面采取静电喷塑处理，采用模压床板工艺，一次模压成型工艺，钢板内填加强筋增加强度，有透气孔；床板四周内焊接加强筋，增加承载力。

- 2、病床靠背与腿板升降连接采用 2.5壁厚管材，将病员的重量均匀地分部在床梁上。
- 3、床板链接采用钢质铰链，模具冲压成型，单片厚度 4mm。耐磨，运作无噪音，防折断。

四：床身主要部件：

- 1、床框采用 40mm × 60mm × 2.0mm 优质碳钢矩管；
- 2、床体四角带防撞包角，包角采用 ABS 工程塑料一次性注塑成型，包角采用专用工具才可拆卸，外形美观。床体四角有输液架插孔，根据需要任意选择输液位置。

五：ABS 阻尼护栏

高强度 ABS 阻尼隐藏式护栏，配有角度显示，可立卧定位，牢固可靠，本色，装有气弹簧缓冲护栏提升与下降的速度，延长护栏使用寿命，通过提手开关实现上下提升功能。四片分体内宿式护栏，采用 ABS 塑钢材质一体注塑成型制作，背部及腿部护栏可分别升降管制，提升病患上下床之安全性与便利性，内缩式护栏设计使病患转床时具零间隙转运功能，避免

zui 右边的一个小锁的图标显示。这时动作的页面会被锁定。这个功能主要是防止误操作。

开锁按键。功能是将显示屏上相关的动作按键开启能够使用。并且也开启护栏按键的功能使用。

1

2

锁定按键：该功能是将显示屏上的功能按键锁定不能使用，同时也锁定了护栏上面的动作按键。锁定以后界面会有一个锁的标志提醒。图片如下：

床体控制界面主要是相关动作的操作按键。按下相关功能的按键以后该功能启动工作，放开按键以后该功能停止工作。有几个按键要注意。

3

进入相关动作操作页面的效果如下。

背部上下操作。左边是还回按键。右边是背部上下操作的按键。

腿部上下操作。左边是还回按键。右边是腿板上下操作的按键。

背腿联动上下操作。左边是还回按键。背腿联动操作的按键。

整体升降操作。左边是还回按键。整体升降操作的按键。

前后倾斜操作。左边是还回按键。前后倾斜操作的按键。

4

进入监测菜单以后界面如下。

中文称重界面

有按键按下时的效果界面

中间显示的是当前床上的重量。

置零是将床上现在的重量归为 0KG，但是置零有个范围，在 40KG 以下可以操作。超过 40KG 系统不允许置零。

保存将现在床上的重量保存下来，以对比后续床上重量的变化。

冻结功能是，当床上有人的情况下。需要向床上增加或者减少重量的时候用的。当床上有重量以后向床上增加了东西，当前重量就会增加，会影响到对病人看重量的观察。使用冻结功能以后，增加上去的物品的重量就不会显示在当前重量上面。

离床功能：开启这个功能以后。当床上的病人的重量减少到当前重量的一半时，系统就会有提示和报警功能。这个功能可关闭。

主界面：按下这个按键能回到一个界面。

病人信息：按下这个按键能去到病人信息查看界面。

床体控制：按下这个按键能去到床体控制界面。

病人信息中文

有按键按下的效果

进入病人信息界面以后本身就会有以前的相关信息显示在屏幕上面。如果需要修改相关信息。系统会提示你输入密码。初始密码是 12345，如果输入正确，系统会提示密码输入正确。如果密码输入错误，系统会提示密码输入错误。界面如下。

密码输入界面中文

密码输入界面英文

密码输入正确的提示。

密码输入错误的提示。

当密码输入完成后就可以修改。病人的信息了。修改可以输入使用英文，或者全拼的汉字。

下面是中英文输入的界面。

主菜单：该按钮用来还回主界面。

下一页：该按钮用来进入快速菜单。界面如下。