

中康品牌 孕妇分娩球 导乐分娩球 医用分娩球生产厂家

产品名称	中康品牌 孕妇分娩球 导乐分娩球 医用分娩球生产厂家
公司名称	山东中康医疗器械有限公司
价格	2980.00/套
规格参数	品牌:中康 型号:ZK-DLQ001 产地:中国·山东
公司地址	山东省临沂市兰山区宏大路与银雀山路交汇西50米路北沿街
联系电话	18321155910

产品详情

中康品牌 孕妇分娩球 导乐分娩球 医用分娩球生产厂家 导乐助产分娩球带架

孕妇分娩球怎么使用？

导乐分娩球可以帮助解决这些问题的：它可以使婴儿处于开始和继续分娩的良好位置，并且可以使妈妈在分娩时自由活动。分娩过程中的自由活动是一名分娩中的孕妈妈可以帮助其婴儿降入产道的方法之一。妈妈本能地对她和婴儿有帮助的方式移动。但是运动可能会很累，因此分娩球可以在妈妈继续移动和摇摆的同时帮助她缓解疲劳加速产程。

导乐分娩球怎么使用？

不要使把球充气到饱满。您希望它有一点柔软，因为这使它更加舒适。

脚平放在地板上，坐在球上，并分开，与出生球形成三脚架。

向后滚动肩膀，并稍微拉低您的下腹部（而不仅仅是让它垂下来）。

您可以尝试做一些小的臀围来伸展骨盆。
或者，您可以使用球来帮助您练习下蹲（打开骨盆并平衡身体的好方法）。

将出生球靠在墙上作为支撑。

提起球，使其靠在中背部。

然后在蹲下时将球上下滚动。这在没有助产士或者其他人提供帮助的情况下非常有用。

