

## 【特价提供各种款式】电子称，健康秤。浴室称人体秤

产品名称	【特价提供各种款式】电子称，健康秤。浴室称人体秤
公司名称	聚宝工贸有限公司
价格	26.00/个
规格参数	品牌:翱航 产品类型:电子 适用人群:成人
公司地址	中国 浙江 永康市 永康
联系电话	86 0579 13588610161 13588610161

### 产品详情

品牌	翱航	产品类型	电子
适用人群	成人	型号	AH-012
规格	30*28*3	最大称量	150KG
分度值	0.1KG	净重	19KG
产地	永康	箱装数量	10
贸易属性	外贸原单	产品类别	体重秤

外观精美，高档~

显示单位: 公斤和英镑任意转换

玻璃尺寸：31\*31厘米

关机方式:自动关机称重范围：2.5-150kg

分度值：0.1kg

显示方式：4位液晶显示

电源：3v cr2032锂电池

工作温度：10-35摄氏度

称重单位：kg/lb

自动关机：10秒

低电压显示：“lo”

针对买家常见问题回答:

1.你家的称易坏吗?

答:产品是钢化玻璃做的,不人为损坏的话,一个称用过10年没问题.

2.称精准度多少,起重多少,承重多少,子用完了怎么办?

答:精准到0.1kg;起重2kg;最大承重150kg.电子用完了,可在当地的商店随处买到.

3.称出的重量比我平时重了10多斤?

答:称后有一个开关,居中是关,左右都可以开,但一边显示的是英磅(lb),另一边显示是千克(kg),如果亲不留意、开关开到了英磅那边,而误当成千克算,就会比平时重10多斤了.所以称上要显示"00kg",才可以秤.

4.怎么我前后称出的重量会不一样,是不是不灵敏?

答:称是靠4个脚上的感应器感应检测重量的,如果你站立不平稳,以至称无法锁定,显示不正确.(你可以放物品在称上多次称,多次显示重量都一样,那称就是没有问题的了,因为物品你放好了不存在不平稳的情况.),所以建意亲们称体重时每次尽量居中平稳站立,以便得到更精准体重数据.

5.这个称每次开机都要踩好几下敲好几下才有显示,还不显示00kg?

答:敲一下要等2秒左右才会有显示的,接着敲几下反而有会延迟显示哦;称刚开机时,是不会直接显示00的,显示1.5、1.8、1.9等的情况都有,别急,显示过2秒后会自己消失,消失后你再敲一下称就可以显示00kg了,这时就可以用称了.

6、为什么有时候人站上去就没显示?因为该秤是振动开关机的,用脚多踩几次,一般就可以显示了,如果还是不能显示,检查下电池,看是不是运输过程中松动了。

可最大承重150kg(显示器最大显示),秤面的钢化玻璃可承受2吨重压。质量过硬!

#### 【注意事项】

手动开机后或将称移动后,应按操作说明使用不使用时不要在称面上堆押物品,以免电池大量消耗,无法正常工作称量时双脚尽量靠中间站稳,防止滑倒,以免无法锁定,显示不准确不能用力重击称体不要放在有水渍的地方使用,不能用水冲洗出厂时已装配锂电池