

# 医疗床充气床垫，防褥疮床垫，医用交替充气用垫信息

产品名称	医疗床充气床垫，防褥疮床垫，医用交替充气用垫信息
公司名称	厦门绵羊抗疲劳垫有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市同安区同安工业集中区同安园158号302、402、502室
联系电话	86 0592 6250788 13559214249

## 产品详情

品名：医疗床

尺寸：98\*215cm

材料：高弹性、无毒、无味pvc，厚度0.3mm

内包装：1pe袋+修理包+气管+气泵+使用说明书

外箱：彩盒

外箱尺寸：31\*11\*11cm

毛重：1.7kg

微电脑自动控制压力，操作简便。交替充气，自由设定床垫软硬程度，床垫压力分高、中、低三档，气管可单根更换，节约医院成本。本产品分为双路，通电状态下每10分钟自动交替充换气。

\*\*==产品描述==\*\*

适用人群：1、因年长而长期卧床的老人；2、因意外事故或疾病而卧床的病人  
3、因其它原因导致活动少、卧床时间长的任何人。

采用国际上现在最先进的生理和动力学原理，进口材料锻压而成的高科技医用产品。通过国家食品药品监督管理部门的严格审核，达到生产和临

床应用标准。是中风病人和高位截瘫病人必备的家庭产品。在多家大中型医院应用取得良好的效果。防褥疮气垫利用定期对两个气囊轮换充气、放气的方法，使卧床患者身体的着床部位不断变化，既能起到了人工按摩的作用，又能促进血液循环、防止肌肉萎缩，病人不需经常翻身也不会长褥疮！并且气垫工作起来连续不断，不需人工干预！防褥疮气床垫的具体工作说明：1、微电脑控制气囊换气；2、气垫尺寸：2150mm×980mm；3、连续使用7天，仅用一度电（功率仅8.5w，长期使用不必考虑电费问题）；4、气囊采用进口高分子环保材料制成，冬天不变硬、夏天不沾身；5、低噪音设计，不大于20分贝。

## 6、长寿命设计。

7.把空气床垫平放床上.8.按合适的宽度打开气气泵的把手,并将把手挂在床架的尾端.9.取出软管,并将软管两端分别连接到气泵和医疗床的充气咀上.检查垫子底下的软管,确保没有打结、翻折等现象。然后固定牢固。10.将交互式充气泵插头插到插座上，打开电源开关，开始充气。（刚开始把电压调到最大处）。

使用注意事项：1．避免触电，请不要打开气泵外壳。2．如果气泵不能运转，可能是因为其它故障，请不要试图打开盖子，否则会触电。请及时联系当地的经销商。3．请不要靠近有火的地方和发热的物体。

公司名称:厦门绵羊抗疲劳垫有限公司

电话:0592-6250788 1860 692 1860蒋文静

传真:0592-7198987

公司地址:厦门市同安集中工业区同安园158号

email : zcxpg@vip.163.com

qq : 1362053131

msn : wenjing.87@hotmail.com

更多详情请见我司企业网站：www.zcxpg.comwww.sheep-mats.com

