

# 芸众医疗 赛复德 止血钳

产品名称	芸众医疗 赛复德 止血钳
公司名称	江苏芸众医疗科技有限公司
价格	.00/把
规格参数	
公司地址	无锡惠山经济开发区惠山大道1719-1号1号楼四层A区
联系电话	0510-82300262 15052139206

## 产品详情

一、产品概述只要用于钳夹血管或出血点，亦称血管钳。其在结构上主要的不同是齿槽床，由于手术操作的需要，齿槽床分为直、弯、直角、弧形等。用于血管手术的血管钳，齿槽的齿较细、较浅，弹性较好，对组织的压榨作用及对血管壁、血管内膜的损伤均较轻，称无损伤血管钳。由于钳的前端平滑，易插入筋膜内，不易刺破静脉，也供分离解剖组织用。也可用于牵引缝线、拔出缝针，或代镊使用，但不宜夹持皮肤、脏器及较脆弱的组织。用于止血是顶端用与组织垂直，夹住出血血管断端，尽量少夹附近组织。止血钳有各种不同的外形和长度，以适应不同性质的手术和部位的需要。除常见的直、弯两种，还有有齿血管钳、蚊式直、弯血管钳。

二、产品分类1) 弯血管钳：用于夹持深部组织或内脏血管出血，有长短两种。

2) 直血管钳：用以夹持浅层组织出血，协助拔针等用。

3) 有齿血管钳:用于夹持较厚组织及易滑脱组织内的血管出血，前端齿可防止滑脱，但不能用以皮下止血。

4) 蚊式血管钳：为细小精巧的血管钳，有直，弯两种，用于脏器、面部及整形等手术的止血，不宜做大块组织钳夹用。

### 三、止血钳齿钳方式

血管钳使用基本同手术剪，但放开时用拇指和食指持住血管钳一个环口，中指和无名指挡住另一环口，将拇指和无名指轻轻用力对顶即可。

四、产品使用注意1)、止血钳不得夹持皮肤、肠管等，以免组织坏死。2)、止血时只扣上一、二齿即可，要检查扣锁是否失灵，有时钳柄会自动松开，造成出血，应警惕。3)、止血钳使用前应检查前端横形齿槽两页是否吻合，不吻合者不用，以防止血管钳夹持组织滑脱。