

芸众医疗 赛复德 组织剪（镶片）

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 芸众医疗 赛复德 组织剪（镶片） |
| 公司名称 | 江苏芸众医疗科技有限公司 |
| 价格 | .00/把 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡惠山经济开发区惠山大道1719-1号1号楼四层A区 |
| 联系电话 | 0510-82300262 15052139206 |

产品详情

一.产品名称：组织剪（镶片）二.产品用途：主要用于组织的剪切或分离。通常浅部手术操作用直剪，深部手术操作用弯剪。三.产品特点：一.剪刀片刃口镶有高强度硬质合金片处理，一剪刀刃口开齿，使得剪刀在使用过程中咬切更快速，咬合力更强劲，指圈镀金色。四.产品使用

正确的持剪刀法为拇指和第四指分别插入剪刀柄的两环，中指放在第四指环的剪刀柄上，食指压在轴节处起稳定和向导作用，有利操作。

正确的执剪姿势为拇指和环指(无名指)分别扣入剪刀柄的两环，中指放在环指的剪刀柄上，示指压在轴节处起稳定和导向作用。初学者执剪常犯错误是将中指扣入柄环，而这种错误的执剪方法不具有良好的三角形稳定作用，从而直接影响动作的稳定性。使用剪刀时，一般采用正剪法，也可采用反剪法，还可采用扶剪法或其他操作。

使剪技巧：

剪割组织时，一般采用正剪法，有时也常采用反剪法，特殊情况也可用左右手特殊方法执剪操作。

有时为了增加稳定性，还可采用扶剪法。为了操作方便。可携剪同时进行其他操作。剪线时微张开剪刀。顺线尾向下滑动至线结的上缘。再将剪刀向上倾斜45度，然后将线剪断。五.组织剪与线剪的区别组织剪的刃锐薄，线剪的刃较钝厚。所以，决不能图方便、贪快，以组织剪代替线剪，以致损坏刀刃，造成浪费。

六.产品规格型号

| 编号 | 规格型号 |
|----------|----------|
| YS-ZC875 | 140,直,镶片 |
| YS-ZC877 | 160,直,镶片 |

| | |
|----------|------------|
| YS-ZC879 | 180,直 , 镶片 |
| YS-ZC881 | 200,直 , 镶片 |
| YS-ZC883 | 220,直 , 镶片 |
| YS-ZC876 | 140,弯 , 镶片 |
| YS-ZC878 | 160,弯 , 镶片 |
| YS-ZC880 | 180,弯 , 镶片 |
| YS-ZC882 | 200,弯 , 镶片 |
| YS-ZC884 | 220,弯 , 镶片 |

若您对我们的产品感兴趣，要更详尽的了解我们的产品，欢迎随时致电我们。