

心肺复苏模拟人无线版,心肺复苏术无线控制模型QY-CPR900

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 心肺复苏模拟人无线版,心肺复苏术无线控制模型QY-CPR900 |
| 公司名称 | 上海求育科教设备有限公司 |
| 价格 | 12000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:上海求育 型号:QY-CPR900 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区江桥镇 |
| 联系电话 | 021-69918115 15021281975 |

产品详情

电脑高/级心肺复苏模拟人是根据《美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR) & 心血管急救(ECC)指南标准》的要求而开发用于提高受训者在发生灾害、意外事故时应急能力的最新急救培训模型。

执行标准：美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准

主要功能：

采用平板电脑控制：模拟心电图显示、矩形图表数据统计、CPR操作动画显示，全程中文语音提示。

模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。

模拟生命体征：

初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。

按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。

抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。

可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。

三种操作方式：可进行CPR训练、模式考核和实战考核。

方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。

方式二：一键考核，在设定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作。

方式三：实战考核，自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压次和吹气的比例。

条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml：

吹气量过少时，条形码为黄色。

吹气量合适时，条形码为绿色。

吹气量过大时，条形码为红色。

吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示；

条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm：

按压深度过少时，条形码为黄色。

按压深度合适时，条形码为绿色。

按压深度过大时，条形码为红色。

可自行设定操作时间，以秒为单位。

操作频率：2015标准为100-120次/分钟，可自行设定数值。

电源状态：USB供电，如遇到USB供电不足时，请外接电源，外接电源接口在人体模型的腰部左侧，外接电源为直流5V2A。

标准套配置：

高/级复苏全身人体模型一具

豪华手拉式人体硬塑箱一只

10寸平板电脑

复苏操作垫一条

屏障面膜（50张/盒）一盒

可换肺囊装置四套

可换面皮一只

2015国际最新操作指南光盘1盘

现场急救常用技术使用手册1本

使用说明书一本

保修卡、合格证