

芸众医疗 赛复德 持针钳

产品名称	芸众医疗 赛复德 持针钳
公司名称	江苏芸众医疗科技有限公司
价格	.00/把
规格参数	
公司地址	无锡惠山经济开发区惠山大道1719-1号1号楼四层A区
联系电话	0510-82300262 15052139206

产品详情

1.产品名称

持针钳也叫持针器。只用于夹持缝针缝合各种组织。有时也用于器械打结。

2.产品分类

- 1) 普通持针钳，分粗针、细针两种，粗针持针钳头部有凹槽，细针持针钳钳头没有凹槽。
- 2) 镶片持针钳，采用全新镶片制造工艺，夹持力更强劲，耐磨性更强。指圈镀金标示。

3.产品使用方法

- 1) .掌握法：也叫一把抓或满把握。钳环紧贴大鱼际肌上，拇指、中指、无名指和小指分别压在钳柄上，后三指并拢起固定作用，食指压在持针钳前部近轴节处。利用拇指及大鱼肌和掌指关节活动推展，张开持针钳柄环上的齿扣，松开齿扣及控制持针钳的张口大小来持针。合拢时，拇指及大鱼际肌与其余掌指部分对握即将扣锁住。此法缝合稳健容易改变缝合针的方向，缝合顺利，操作方便.
- 2) .指套法，为传统执法。用拇指、无名指套入钳环内，以手指活动力量来控制持针钳的开闭，并控制其张开与合拢时的动作范围。用中指套入钳环内的执钳法，因距支点远而稳定性差，故为是错误的执法。
- 3) .掌指法：拇指套入钳环内，食指压在钳的前半部做支撑引导，余三指压钳环固定于掌中。拇指可以上下开闭活动，控制持针钳的张开与合拢

4.产品使用注意

用持针器的尖夹住缝针的中、后1 / 3交界处为宜，多数情况下夹持的针尖应向左，特殊情况可向右，缝线应重叠1/3，且将绕线重叠部分也放于针嘴内。以利于操作，若将针夹在持针器中间，则容易将针

折断。

5.产品规格型号

持针钳：粗针和细针

YP-ZM234	140，粗针	YP-ZM
YP-ZM246	160，粗针	YP-ZM
YP-ZM236	180，粗针	YP-ZM
YP-ZM237	200，粗针	YP-ZM
YP-ZM238	220，粗针	YP-ZM
YP-ZM250	250，粗针	YP-ZM

镶片持针钳

YP-ZM015	140，直，粗针0.5	YP-ZM013	125，直，细针0.3	YP-ZM068
YP-ZM032	160，直，粗针0.5	YP-ZM016	140，直，细针0.3	YP-ZM071
YP-ZM066	180，直，粗针0.5	YP-ZM033	160，直，细针0.3	YP-ZM072
YP-ZM077	200，直，粗针0.5	YP-ZM017	180，直，细针0.3	YP-ZM018
YP-ZM079	220，直，粗针0.5	YP-ZM022	200，直，细针0.3	YP-ZM073
YP-ZM097	250，直，粗针0.5	YP-ZM080	220，直，细针0.3	YP-ZM071
YP-ZM122	260，直，粗针0.5	YP-ZM081	250，直，细针0.3	
YP-ZM123	280，直，粗针0.5	YP-ZM127	300，直，细针0.3	

持针器为临床常见器械，使用频率很高。但是，绝不推荐使用任何器械(即使该器械前端的结构与持针器相似)对其进行功能上的代替。除非情况万分紧急，可使用直血管钳进行相同操作，但小心。因为可能出现夹持不牢固导致弯针滑脱或方向改变，以及损坏持针器及弯针的情况。从而伤及患者组织或术者手部。

如有需要了解更详尽的手术器械信息，欢迎随时与我们联系，期待您的来电！