

新华牌压力蒸汽灭菌化学指示胶粘带 使用说明书TY19501

产品名称	新华牌压力蒸汽灭菌化学指示胶粘带 使用说明书TY19501
公司名称	上海润宝医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:新华 型号:TY19501 包装:19mmx 50m
公司地址	上海市宝山区长江南路530弄181号
联系电话	18964057008

产品详情

新华牌压力蒸汽灭菌化学指示胶粘带

使用说明书TY19501

一、新华牌压力蒸汽灭菌化学指示胶粘带产品说明

胶粘带表面印有的化学指示剂，在饱和蒸汽的湿热作用下，达到设定时间和饱和蒸汽115 ° C以上的灭菌条件时发生化学变化，并伴随有颜色改变。其颜色的深浅与蒸汽的湿度、温度及持续的时间密切相关。依据指示剂显色效果，以确认所指示的物品是否经过相应加热与时间处理。但本品不能用于指示灭菌效果。

二、新华牌压力蒸汽灭菌化学指示胶粘带结构特性

- 1、本产品在设计上采用胶粘带形式，可代替医院中惯用的封闭灭菌包的别针、夹子或捆扎绳。
- 2、载体选用国内外优质特殊纸，强度高，具有一定的伸缩性。
- 3、指示剂:由多种化学物质组成，设计合理性能稳定，简便准确,容易判断。
- 4、防粘剂:由多种物质调制而成，防粘效果好，且在上面能用任何标记笔书写相关内容。
- 5.胶粘剂:选用特殊压敏胶，性能优良，粘贴牢固，耐高温。

三、新华牌压力蒸汽灭菌化学指示胶粘带使用范围

本产品适用于医疗卫生机构等部门用以指示物品是否经过115 ° C，30分钟;121 ° C，20分钟;132 ° C，3分钟的灭菌过程。

四、使用方法

截取适当长度胶粘带，贴于待灭菌包裹表面，然后，进行常规灭菌处理。灭菌完毕，将包裹取出，观察胶粘带表面指示剂变化。如果指示剂颜色变成黑色，表明此包裹已经过灭菌处理;如果指示剂颜色无变化，则表明此包裹没有经过灭菌处理。

五、注意事项

- 1、胶粘带如果长时间暴露于空气当中，其表面指示剂颜色变暗，这不影响使用性能。
- 2、本产品不能作为灭菌效果的判断，只能表示物品是否经过灭菌处理。
- 3、指示剂变色反应为不可逆反应。反应后的指示剂可在常温下保存。
- 4、如果指示剂变色不完全，请检查包内指示剂的变色情况。
- 5、请在有效期内使用本品。
- 6、避光、室温、通风，干燥、密封保存。
- 7、切勿受潮，禁止与酸、碱性物质接触。

六，规格: 19mmx 50m。

七，有效期：24个月 生产日期，批号见 包装指示胶粘带 ,蒸汽灭菌化学指示胶粘带 ,新华牌指示胶粘带