

骨髓穿刺训练仿真人体模型QY-NS48

产品名称	骨髓穿刺训练仿真人体模型QY-NS48
公司名称	上海求育科教设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海求育 型号:QY-NS48 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区江桥镇
联系电话	021-69918115 15021281975

产品详情

模型解剖标志准确：胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位。

可进行髂前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓。

使用方法：1、在髂前上棘穿刺点和胸骨穿刺点进行骨髓穿刺模拟训练时，骨髓穿刺模型取仰卧位（建议将模型枕部垫高，以免反复穿刺后针孔渗血），按常规操作方法操作即可。2、将骨髓穿刺针的穿刺器固定在适当的长度上，髂前上棘为1.5CM，胸骨穿刺为1CM，操作者左手拇指和食指固定穿刺部位，右手持骨髓穿刺针与骨面垂直刺入，若为胸骨穿刺则应与骨面成30 - 40度角刺入。3、当穿刺针尖接触骨质后，沿穿刺针的针体长轴左右旋转穿刺针，并向前推进，缓缓刺入骨质，当突然感到穿刺阻力消失，且穿刺针已固定在骨内时，表明穿刺针已进入骨髓腔。4、拔出穿刺针针芯，接上干燥的注射器，用适当的力量抽取模拟骨髓液0.1ML。注：皮肤和模拟骨髓腔可方便更换，供应耗材