

芸众医疗 赛复德 精细手术剪（解剖剪）

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 芸众医疗 赛复德 精细手术剪（解剖剪） |
| 公司名称 | 江苏芸众医疗科技有限公司 |
| 价格 | .00/把 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡惠山经济开发区惠山大道1719-1号1号楼四层A区 |
| 联系电话 | 0510-82300262 15052139206 |

产品详情

手术器械是手术室的重要财产，也是手术室的基本设备，更是手术操作中的重要工具。各种手术器械由不锈钢制成，精致轻便，易于保持，结构圆滑，便于操作，弹性好，韧性强，耐高温，不生锈等特点。

一、产品概述

精细手术剪（解剖剪）头部前端精细，用于已切除的组织器官的解剖及肌腱等组织的精细剪切、分离。

二、产品使用方法

正确的执剪法是以拇指和第四指插入剪柄的两环内，但不宜插入过深；食指轻压在剪柄和剪刀交界的关节处，中指放在第四指环的前外方柄上，准确地控制剪的方向和剪开的长度。

三、产品规格型号

YS-ZC049 125，直尖，解剖型

YS-ZC051 145，直尖，解剖型

YS-ZC050 125，弯尖，解剖型

YS-ZC052 145，弯尖，解剖型

四、产品的清洗与维护

手术器械的性能直接关系手术的成败和病人的健康，所以说手术器械是医疗工作最重要的工具之一。

手术器械的清洗和保养是一项繁琐的工作，所以手术结束后我们必须按照严格程序清洗器械：

- 1、 每台手术结束后所用的器械在清洗前都需要进行浸泡，放入多酶清洗剂浸泡2~5 min后再清洗，目的是使存留在器械表面和机械连接部位缝中的污物分解和软化，以便清洗。
- 2、 用流动的水冲去肉眼可见的血污，同时将已生锈的器械采用专用除锈剂进行人工除锈处理，打开器械的各个关节，用毛刷蘸取除锈剂充分刷洗。
- 3、 清洗人员必须做好个人防护，戴好口罩、帽子、橡胶手套，以防止交叉感染。
- 4、 除锈完毕，将手术器械轴节完全打开，摆放整齐按种类分别放入自动清洗机清洗筐内，用自动清洗机清洗。清洗液内加入多酶清洗剂。
- 5、 洗涤后的金属器械应检查其光亮、洁净、轴节灵活性，有无裂缝、生锈打弯等。
- 6、 器械清洗后均需干燥，因为手术器械多为不锈钢制成，当它与气体或液体接触时就会发生氧化反应，从而产生锈蚀。所以，当手术器械清洗不彻底，就会发生金属器械的锈蚀，给洗涤工作带来困难，同时缩短使用寿命。
- 7、 将器械认真核对检查，看其是否完好无损，根据用途检查功能，有关节的器械应检查关节活动性、咬合功能及咬齿情况，锐利的器械应测试其锐利性，有螺丝的器械要检查其完整性及有松脱现象等。

每个月定期对手术器械进行保养，保养项目为：

- 1、 擦拭表面灰尘；
- 2、 用除锈剂浸泡，浸泡必须打开所有器械的关节部分；
- 3、 浸泡30分钟后用流水清洗；
- 4、 将器械擦干，关节部分可用吹风机吹干或摊开晾干；
- 5、 器械擦干后，用石蜡油均匀擦拭；
- 6、 将器械按照顺序在器械盒内摆放整齐。保养人员为骨科业务员，每月轮流保养，并做好记录。如发现有损坏或缺少的器械，必须及时向领导汇报，及时处理，便于手术使用

若有需要的手术器械或者想要了解更多的手术器械信息，欢迎随时联系我们。